



| Pos. | 20 mm | Bezeichnung | Mögliches Problem | Maßnahme | Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch* | Spätester Austausch nach |
|---|---------------|---|------------------------------|-------------|---|--------------------------|
| Systemgelenk | | | | | | |
| 1 | SB1069-L0960 | Splintbolzen | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 36 Monaten |
| 3 | SF0395-02 | Passfeder mit Stift | Bruch | austauschen | alle 6 Monate | 36 Monaten |
| 4 | GS2611-040 | Gleitscheibe, Ø = 26 mm | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 18 Monaten |
| 4 | GS2611-045 | | | | | |
| 4 | GS2611-050 | | | | | |
| 4 | GS2611-055 | | | | | |
| 4 | GS2611-060 | | | | | |
| 5 | SH0665-L/AL | Deckplatte, links lateral oder rechts medial** | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 36 Monaten |
| 5 | SH0665-R/AL | Deckplatte, links medial oder rechts lateral** | | | | |
| 6a | VE3771-09/15 | O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube** | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 18 Monaten |
| 6c | FE1027-01 | Druckfeder** | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 18 Monaten |
| 6d | GS1108-500 | Gleitbuchse** | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 18 Monaten |
| 6e | VE3771-012/26 | O-Ring-Dämpfer** | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 18 Monaten |
| 6f | SH0493-01 | Kolben** | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 36 Monaten |
| 7 | SC1405-L14 | Senkschraube mit Innensechsrund** | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 36 Monaten |
| 8 | SC1406-L14 | Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)** | | | | |
| 5-8 | SH6975-L/AL | Funktionseinheit plug + go Modularität, links lateral oder rechts medial*** | Funktionsverlust, Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 36 Monaten |
| 5-8 | SH6975-R/AL | Funktionseinheit plug + go Modularität, links medial oder rechts lateral*** | | | | |
| Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen | | | | | | |
| 9 | BR1211-L030 | Gleitbuchse | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 18 Monaten |
| 10 | siehe Katalog | Systemfußbügel | Verschleiß oder Bruch | austauschen | alle 6 Monate | 48 Monaten |
| 11 | siehe Katalog | Systemanker und Systemschienen | Verschleiß oder Bruch | austauschen | alle 6 Monate | nach Bedarf |

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

** ist Bestandteil der Funktionseinheit

*** enthaltene Systembauteile auch separat austauschbar