



| Pos.  | 20 mm         | Bezeichnung                                       | Mögliches Problem            | Maßnahme    | Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch* | Spätester Austausch nach |
|---|---------------|---|------------------------------|-------------|---|--------------------------|
| <b>Systemgelenk mit Passfedern</b>                    |               |   |                              |             |   |                          |
| 1   | SB1069-L0960  | Splintbolzen                                      | Verschleiß                   | austauschen | alle 6 Monate                           | 36 Monaten               |
| 3   | SF0395-02     | Passfeder mit Stift                               | Bruch                        | austauschen | alle 6 Monate                           | 36 Monaten               |
| 4   | GS2611-040    | Gleitscheibe, Ø = 26 mm                           | Verschleiß                   | austauschen | alle 6 Monate                           | 18 Monaten               |
| 4   | GS2611-045    |   |                              |             |   |                          |
| 4   | GS2611-050    |   |                              |             |   |                          |
| 4   | GS2611-055    |   |                              |             |   |                          |
| 4   | GS2611-060    |   |                              |             |   |                          |
| 5   | SF0665-AL     | Deckplatte**                                      | Verschleiß                   | austauschen | alle 6 Monate                           | 36 Monaten               |
| 6a  | VE3771-09/15  | O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube** | Verschleiß                   | austauschen | alle 6 Monate                           | 18 Monaten               |
| 6c  | FE1027-01     | Druckfeder**                                      | Verschleiß                   | austauschen | alle 6 Monate                           | 18 Monaten               |
| 6d  | GS1108-500    | Gleitbuchse**                                     | Verschleiß                   | austauschen | alle 6 Monate                           | 18 Monaten               |
| 6e  | VE3771-012/26 | O-Ring-Dämpfer**                                  | Verschleiß                   | austauschen | alle 6 Monate                           | 18 Monaten               |
| 6f  | SH0493-01     | Kolben**  | Verschleiß                   | austauschen | alle 6 Monate                           | 36 Monaten               |
| 7   | SC1405-L14    | Senkschraube mit Innensechsrund**                 | Verschleiß                   | austauschen | alle 6 Monate                           | 36 Monaten               |
| 8   | SC1406-L14    | Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)**  |                              |             |   |                          |
| 5-8   | SF6975-AL     | Funktionseinheit plug + go Modularität***         | Funktionsverlust, Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate                           | 36 Monaten               |
| <b>Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen</b> |               |   |                              |             |   |                          |
| 9   | BR1211-L030   | Gleitbuchse                                       | Verschleiß                   | austauschen | alle 6 Monate                           | 18 Monaten               |
| 10  | siehe Katalog | Systemfußbügel                                    | Verschleiß oder Bruch        | austauschen | alle 6 Monate                           | 48 Monaten               |
| 11  | siehe Katalog | Systemanker und Systemschienen                    | Verschleiß oder Bruch        | austauschen | alle 6 Monate                           | nach Bedarf              |

\* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

\*\* ist Bestandteil der Funktionseinheit

\*\*\* enthaltene Systembauteile auch separat austauschbar