



Pos.	20 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk ohne Passfedern						
1	SB1069-L0960	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
4	GS2611-040	Gleitscheibe, Ø = 26 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
4	GS2611-045					
4	GS2611-050					
4	GS2611-055					
4	GS2611-060					
5	SF0665-3/AL	Deckplatte**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
6a	VE3771-09/15	O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6c	FE1027-01	Druckfeder**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6d	GS1108-500	Gleitbuchse**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6e	VE3771-012/26	O-Ring-Dämpfer**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6f	SH0493-01	Kolben**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
7	SC1416-L14	Senkschraube mit Innensechsrund**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8	SC1416-L14	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)**				
5-8	SF6985-AL	Funktionseinheit plug + go Modularität***	Funktionsverlust, Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen						
9	BR1211-L030	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
10	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
11	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

** ist Bestandteil der Funktionseinheit

*** enthaltene Systembauteile auch separat austauschbar