



Pos.	20 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB1069-L0960	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	SF0395-02	Passfeder mit Stift	Bruch	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
4	GS2611-040	Gleitscheibe, $\varnothing = 26$ mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
4	GS2611-045					
4	GS2611-050					
4	GS2611-055					
4	GS2611-060					
5	SF0865-L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
5	SF0865-R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral**				
6a	VE3771-09/15	O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	6 Monaten
6c	FE1027-01	Druckfeder**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6d	GS1108-500	Gleitbuchse**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6e	VE3771-012/26	O-Ring-Dämpfer**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	6 Monaten
6f	SH0493-01	Kolben**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8	FE2966-01	Druckfeder, goldfarben**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
9	SF0845-10	Bolzen**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
11	SC1405-L14	Senkschraube mit Innensechsrund**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
12	SC1406-L14	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)**				
5-12	SF8975-L/AL	Funktionseinheit plug + go Modularität, links lateral oder rechts medial***	Funktionsverlust, Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
5-12	SF8975-R/AL	Funktionseinheit plug + go Modularität, links medial oder rechts lateral***				
Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen						
13	BR1211-L030	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
14	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
15	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

** ist Bestandteil der Funktionseinheit

*** enthaltene Systembauteile auch separat austauschbar