



Pos.	20 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk mit Passfedern						
1	SB1069-L0960	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	SF0395-02	Passfeder mit Stift	Bruch	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
5	GS2611-040	Gleitscheibe, Ø = 26 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
5	GS2611-045					
5	GS2611-050					
5	GS2611-055					
5	GS2611-060					
6	SH0565-AL	Deckplatte**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
7	SH0493-01	Kolben**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8	VE3771-012/26	O-Ring-Dämpfer**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
9	GS1108-500	Gleitbuchse**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
10	FE1027-01	Druckfeder**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
11a	VE3771-125/15	O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
11c	VE3771-07/10	O-Ring zur Sicherung der Bewegungs-limitierungsschraube**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
12	SC1405-L14	Senkschraube mit Innensechsrund**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
13	SC1406-L14	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)**				
6-13	SH5975-AL	Funktionseinheit plug + go Modularität***	Funktionsverlust, Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten

Patientenkommission/Konfigurations-ID _____



Pos.	20 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Federeinheiten						
14	VE3771-11/10	O-Ring zur Sicherung der Federeinheit	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
15	SH5805-15/18	Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
15	SH5805-15/25	Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit				
15	SH5805-10/40	Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit	Verrutschen der Tellerfedern	Tellerfedern mit Zange neu ausrichten	alle 6 Monate	18 Monaten
15	SH5805-10/60	Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit	Geräusche der Federeinheit	Federeinheit mit Sprühöl (Art.-Nr. FT3000-15) fetten		
15	SH5805-05/99	Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit				
Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen						
16	BR1211-L030	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
17	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
18	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

** ist Bestandteil der Funktionseinheit

*** enthaltene Systembauteile auch separat austauschbar