



Pos.	20 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
<b>Articulation modulaire</b>						
1	SB1069-L0960	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
3	SF0395-02	clavette avec goupille	rupture	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
4	GS2611-040	rondelle de friction, Ø = 26 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
4	GS2611-045					
4	GS2611-050					
4	GS2611-055					
4	GS2611-060					
5	SH0565-AL	plaque supérieure**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
6	SH0493-01	piston**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
7	VE3771-012/26	amortisseur à joint torique**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
8	GS1108-500	douille de guidage**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
9	FE1027-01	ressort de pression**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
10a	VE3771-125/15	joint torique pour le blocage de la vis de réglage sur orthèse**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
10c	VE3771-07/10	joint torique pour le blocage de la vis de limitation du mouvement**	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
11	SC1405-L14	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
12	SC1406-L14	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)**				
5-12	SH5975-AL	ensemble fonctionnel modularité plug + go***	perte de fonctionnalité, usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois

Commission des patients/ID de configuration \_\_\_\_\_



Pos.	20 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
<b>Mécanismes de ressort</b>						
13	VE3771-11/10	joint torique pour le blocage du mécanisme de ressort	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
14	SH5805-15/18	mécanisme de ressort, bleu, normale, liberté de mouvement max. 15°	usure glissement des rondelles Belleville	remplacer réaligner les rondelles Belleville à l'aide d'une pince	tous les 6 mois	18 mois
14	SH5805-15/25	mécanisme de ressort, vert, moyen, liberté de mouvement max. 15°	bruit du mécanisme de ressort avec ressort de pression	graisser le ressort de pression avec de la graisse pour articulation d'orthèse ou de l'huile en spray (Réf. FT3000-15)		
14	SH5805-10/40	mécanisme de ressort, blanc, fort, liberté de mouvement max. 10°		graisser les rondelles Belleville avec de l'huile en spray (Réf. FT3000-15)		
14	SH5805-10/60	mécanisme de ressort, jaune, très fort, liberté de mouvement max. 10°				
14	SH5805-05/99	mécanisme de ressort, rouge, ultra-fort, liberté de mouvement max. 5°	bruit du mécanisme de ressort avec des rondelles Belleville	graisser les rondelles Belleville avec de l'huile en spray (Réf. FT3000-15)		
<b>Étriers de pied modulaires, ancrages modulaires et montants modulaires</b>						
15	BR1211-L030	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
16	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
17	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

\* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient

\*\* fait partie intégrante de l'ensemble fonctionnel

\*\*\* composants modulaires compris peuvent également être remplacés séparément