


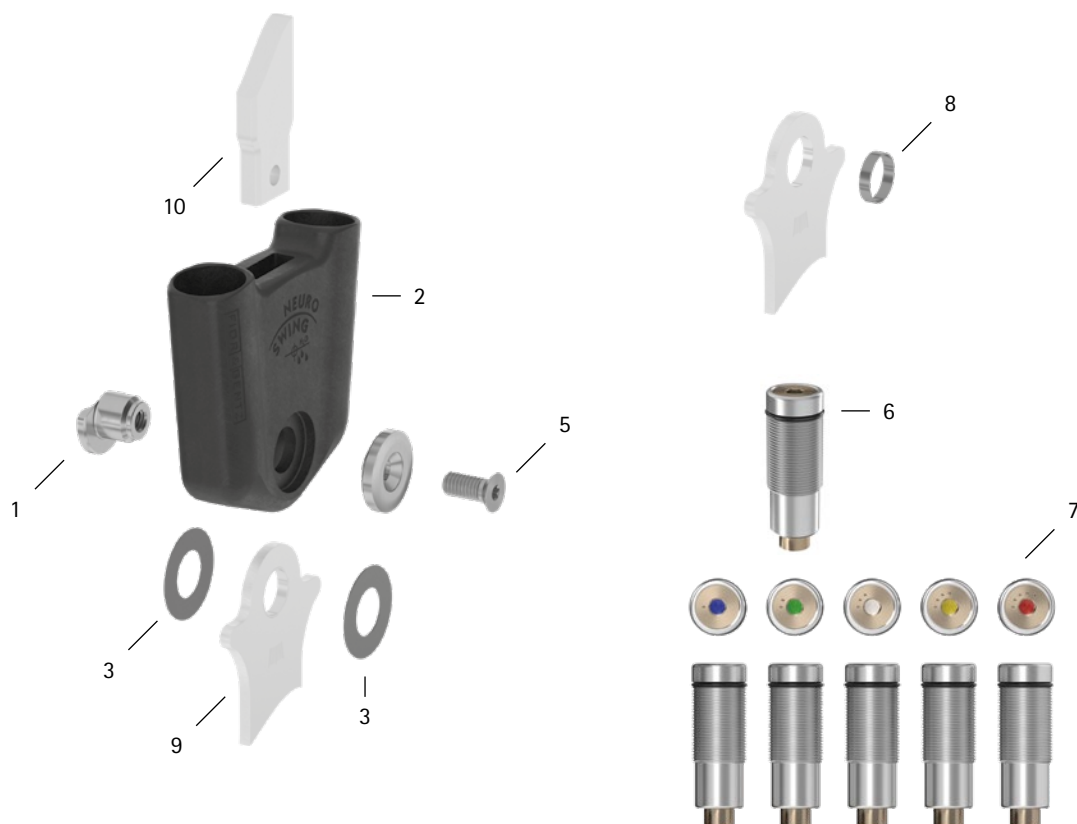

Pos.	12 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SF0591-C/1	Splintbolzen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
2	SF0501-C	Gelenkgehäuse	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
3	GS1409-040	Gleitscheibe, Ø = 14 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
3	GS1409-045					
3	GS1409-050					
3	GS1409-055					
3	GS1409-060					
5	SC1404-L10	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
Federeinheiten						
6	VE3771-085/13	O-Ring zur Sicherung der Federeinheit	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
7	SF5801-C/15/03	Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit	Verschleiß Geräusche der Federeinheit	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
7	SF5801-C/15/06	Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit				
7	SF5801-C/10/12	Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit				
7	SF5801-C/10/19	Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit				
7	SF5801-C/05/33	Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit				
Systemfußbügel, Systemmanker und Systemschienen						
8	BR1009-L020	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
9	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
10	siehe Katalog	Systemmanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
-	-	Klebeverbindung (Systemschiene/Systemmanker und Systemgelenk)	Bruch	neues System- bauteil aus Carbon einkleben	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten