


Patientenkommission/Konfigurations-ID \_\_\_\_\_

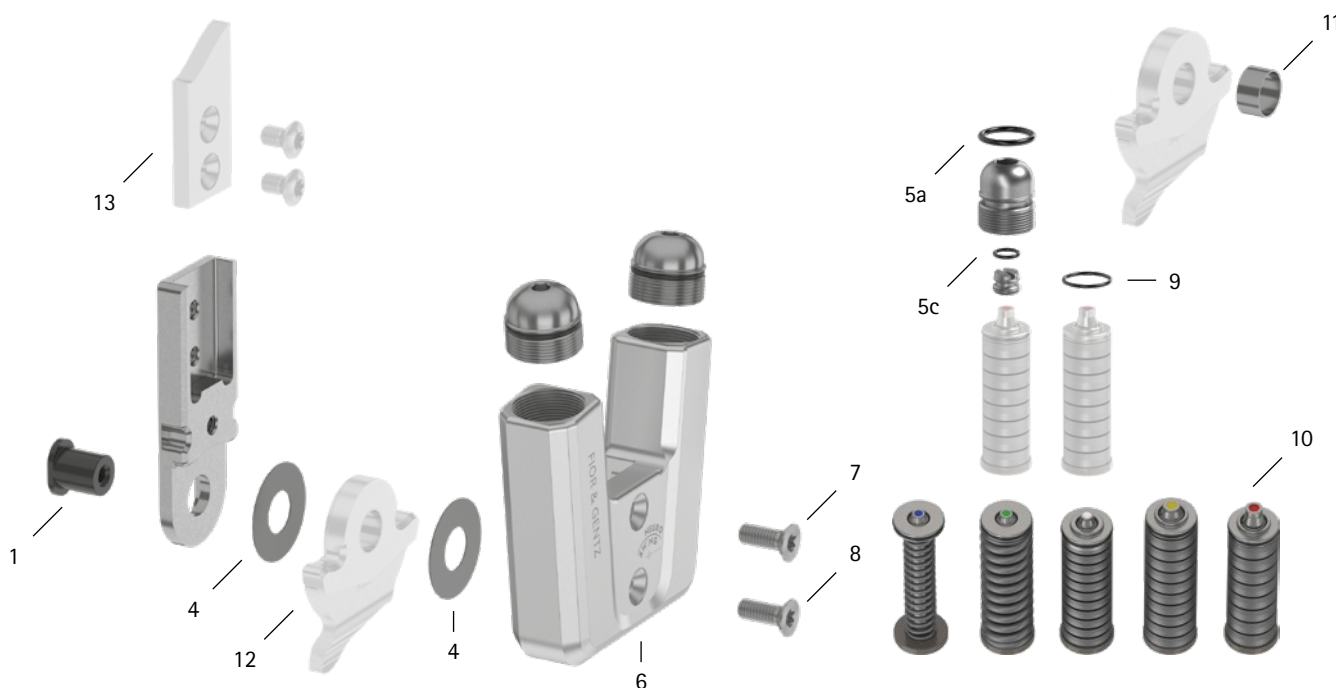

Pos.	24 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
<b>Systemgelenk</b>						
1	SB1262-L1400	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
4	GS3013-040	Gleitscheibe, Ø = 30 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
4	GS3013-045					
4	GS3013-050					
4	GS3013-055					
4	GS3013-060					
5a	VE3771-160/15	O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
5c	VE3771-07/10	O-Ring zur Sicherung der Bewegungslimitierungsschraube**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6	SF0567-2/AL	Deckplatte**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
7	SC1416-L16	Senkschraube mit Innensechsrund**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8	SC1416-L16	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)**				
5-8	SF5977-AL	Funktionseinheit***	Funktionsverlust, Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
<b>Federeinheiten</b>						
9	VE3771-140/10	O-Ring zur Sicherung der Federeinheit	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
10	SF5807-15/12	Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
10	SF5807-15/25	Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit	Verrutschen der Tellerfedern	Tellerfedern mit Zange neu ausrichten		
10	SF5807-10/53	Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit	Geräusche der Federeinheit mit Druckfeder	Druckfeder mit Orthesengelenkfett oder Sprühöl (Art.-Nr. FT3000-15) fetten		
10	SF5807-10/80	Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit	Geräusche der Federeinheit mit Tellerfedern	Tellerfedern seitlich mit Sprühöl (Art.-Nr. FT3000-15) fetten		
10	SF5807-05/99	Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit				
<b>Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen</b>						
11	BR1413-L070	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
12	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
13	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

\* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

\*\* ist Bestandteil der Funktionseinheit

\*\*\* enthaltene Systembauteile auch separat austauschbar

WP0127-DE-2024-03