

# Übersicht zu Drehmomenten für die Schraubensicherung

In dieser Tabelle finden Sie eine Übersicht zu den Drehmomenten für die Schraubensicherung aller FIOR & GENTZ Systemgelenke und Gelenkschienen für Knieorthesen. Die Angaben finden Sie ebenfalls im Rahmen einer ausführlichen Montageanleitung in der Produktbeilage des jeweiligen Artikels.

Systemknöchelgelenke	Schrauben	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm
NEURO CLASSIC	Achsschraube (S1)	1,5 Nm	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	1,5 Nm	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
NEURO SPRING	Achsschraube (S1)	-	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	-	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm
NEURO VARIO-CLASSIC	Achsschraube (S1)	-	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	-	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm
NEURO VARIO	Achsschraube (S1)	1,5 Nm	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	1,5 Nm	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
NEURO VARIO-SPRING	Achsschraube (S1)	-	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	-	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm
NEURO CLASSIC-SWING NEURO VARIO 2 NEURO VARIO-SWING NEURO SWING-CLASSIC, NEURO SWING	Pressschraube und Schraube (S1)	2,5 Nm	4 Nm	6 Nm	6 Nm	6 Nm
	Schraube 2, Achsschraube (S2)	1,5 Nm	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
NEURO SWING H <sub>2</sub> O	Achsschraube (S1)	-	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
<b>Systemkniegelenke</b>						
NEURO CLASSIC zero	Achsschraube (S1)	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	-	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
NEURO VARIO zero	Achsschraube (S1)	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	-	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
NEURO CLASSIC	Achsschraube (S1)	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	-	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
NEURO VARIO	Achsschraube (S1)	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	-	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
NEURO ACTIVE Systemkniegelenk	Schraube 1 (S1)	-	-	-	4 Nm	-
	Schraube 2 (S2)	-	-	-	4 Nm	-
NEURO ACTIVE Systemgelenkschiene	Schraube 1 (S1)	4 Nm	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	4 Nm	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm
NEURO MATIC	Achsschraube (S1)	-	-	-	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	-	-	-	3 Nm	4 Nm
NEURO TRONIC	Achsschraube (S1)	-	-	-	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	-	-	-	3 Nm	4 Nm
NEURO LOCK	Achsschraube (S1)	-	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	-	-	3 Nm	3 Nm	3 Nm
NEURO LOCK MAX	Achsschraube (S1)	-	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	-	3 Nm	3 Nm	3 Nm	4 Nm
NEURO FLEX MAX	Achsschraube (S1)	-	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	-	3 Nm	3 Nm	3 Nm	4 Nm
<b>Gelenkschienen für Knieorthesen</b>						
Gelenkschienen für Knieorthesen	Schraube 1 (S1)	4 Nm	4 Nm	-	-	-
	Schraube 2 (S2)	4 Nm	4 Nm	-	-	-