

# Bruksanvisning for ortopediteknikere eller kvalifiserte/utdannede eksperter Systemankelledd



**NEURO**  
**VARIO-SWING**

NEURO VARIO-SWING

---

Download: [www.fior-gentz.com](http://www.fior-gentz.com)

Innhold	side
1. Informasjon	4
2. Sikkerhetsanvisninger	4
2.1 Klassifisering av sikkerhetsanvisningene	4
2.2 All informasjon om sikker bruk av systemkelleddet	4
3. Bruk	7
3.1 Bruksformål	7
3.2 Indikasjon	7
3.3 Kontraindikasjon	7
3.4 Kvalifikasjoner	7
3.5 Bruk	7
3.6 Kombinasjonsmuligheter med andre systemledd	8
4. Leddfunksjon	8
5. Leveringsinnhold	9
6. Bæreevne	9
7. Verktøy for montering av systemleddet	9
8. Montering av systemleddet	10
8.1 Demontering av dekkplaten	10
8.2 Montering av dekkplaten	10
8.3 Montering av systemfotbøylen	11
8.4 Kontrollere at bevegelsene er smidige	11
8.5 Montering av skruenheten	12
8.6 Montering av fjærenheten	12
8.7 Sikring av skruene	13
9. Innstillingsmuligheter på ortosen	13
9.1 Justerbar struktur	14
9.2 Justerbar bevegelsesfrihet	14
9.3 Justerbar fjærstyrke	14
9.4 Avlesing av leddvinkel	15
10. Merknader om produksjon av ortosen	15
10.1 Forbindelse til systemskinne/systemanker	15
10.2 Sliping av ortosedeler	15
11. Ombygging av systemkelledd	15
11.1 Alternativer for ombygging med plug + go-modularitet	16
11.1.1 Ombygging med plug + go-modularitet	16
11.2 Ombyggingsalternativer uten plug + go-modularitet	16
11.2.1 Ombygging uten plug + go-modularitet	16

---

12. Vedlikehold	17
12.1 Dokumentasjon av vedlikehold i servicepasset for ortosen	18
12.2 Vedlikehold av tallerkenfjærene	18
12.3 Utskifting av glideskivene	19
12.4 Fjerning av smuss	19
13. Brukstid	19
14. Oppbevaring	19
15. Reservedeler	20
15.1 Detaljert tegning av NEURO VARIO-SWING	20
15.2 Reservedeler for systemankelleddet NEURO VARIO-SWING	21
15.3 Fjærenheter	23
16. Kassering	24
17. Symbolforklaring	24
18. CE-samsvar	25
19. Rettslig informasjon	25
20. Informasjon for behandlingsdokumentasjon	26
21. Overlevering av ortosen	27




---

## 1. Informasjon

Denne bruksanvisningen er rettet mot ortopediteknikere eller kvalifiserte/utdannede eksperter og inneholder derfor ingen opplysninger om farer som er åpenbare for deg. For å kunne sørge for høyest mulig sikkerhet må pasienten og/eller behandlingsteamet læres opp i bruk og vedlikehold av produktet.

## 2. Sikkerhetsanvisninger

### 2.1 Klassifisering av sikkerhetsanvisningene

 <b>FARE</b>	Viktig informasjon om en mulig farlig situasjon som kan føre til kritisk skade eller død dersom den ikke blir avverget.
 <b>ADVARSEL</b>	Viktig informasjon om en mulig farlig situasjon som kan føre til kritisk skade som vil kreve behandling av lege dersom den ikke blir avverget.
 <b>FORSIKTIG</b>	Viktig informasjon om en mulig farlig situasjon som kan føre til lettere skader som ikke vil kreve behandling av lege dersom den ikke blir avverget.
<b>MERK</b>	Viktig informasjon om en mulig situasjon som kan føre til materielle skader på produktet dersom den ikke blir avverget.

Alle alvorlige hendelser i henhold til forskrift (EU) 2017/745 som har oppstått i forbindelse med produktet, skal rapporteres til produsenten og den ansvarlige myndigheten i landet der ortopediteknikeren eller den kvalifiserte/utdannede eksperten og/eller pasienten holder til.

### 2.2 All informasjon om sikker bruk av systemankelleddet

#### **FARE**

##### Mulig trafikkulykke på grunn av begrenset kjøreevne

Du må sørge for at pasienten er informert om alle sikkerhetsrelevante aspekter før han/hun kjører bil med ortose. Pasienten bør være i stand til å kjøre bil på en sikker måte.

#### **ADVARSEL**

##### Fare for fall på grunn av feil håndtering

Informer pasienten om riktig bruk av systemleddet og om mulige farer, særlig med hensyn til:

- fuktighet og vann
- for høy mekanisk belastning (f.eks. på grunn av idrett, økt aktivitetsnivå, vektøkning)

#### **ADVARSEL**

##### Fare for fall på grunn av feil bearbeiding

Monter systemleddet i henhold til opplysningene i denne bruksanvisningen. Montering og endringer av systemleddet som avviker fra bruksanvisningen, krever skriftlig tillatelse fra produsenten.

## ADVARSEL

### Fare for fall på grunn av løsnede skruer

Fest dekselplaten på systemleddet i henhold til informasjonen i denne bruksanvisningen. Sikre skruene med det angitte dreiemomentet og det tilsvarende limet, og pass på at du ikke skader glideskivene når du gjør dette.

## ADVARSEL

### Fare for fall på grunn av feil valgte systemkomponenter

Kontroller at systemleddet og systemkomponentene ikke er overbelastet og at de er funksjonelt tilpasset pasientens behov for å unngå forstyrrelser i leddfunksjonen.

## ADVARSEL

### Fare for fall på grunn av kontinuerlig høy belastning

Dersom pasientdataene har forandret seg (f.eks. på grunn av vektøkning, vekst eller økt aktivitetsnivå), må du beregne den forventede belastningen på systemleddet på nytt, tilpasse behandlingen og eventuelt lage en nytt ortose.

## ADVARSEL

### Fare for fall på grunn av feil sko/feil fotsenger

Informér pasienten om at han/hun bare må bruke sko som er tilpasset ortosen, for å unngå forstyrrelser i leddfunksjonene.

## ADVARSEL

### Fare for fall på grunn av for kraftig etterjusterte fjærenheter/skruenheter

Juster fjærenheter/skruenheter i henhold til opplysningene i denne bruksanvisningen. Ikke etterjuster med mer enn 10°. Bruk lasermerkene på systemfotbøylen og den øvre delen av leddet for å kontrollere etterjusteringene.

## ADVARSEL

### Skader på det anatomiske leddet på grunn av feil posisjonering av det mekaniske leddreiepunktet

Fastsett det mekaniske leddreiepunktet riktig for å unngå kontinuerlig feilbelastning av det anatomiske leddet. Følg nettveiledningen på hjemmesiden til FIOR & GENTZ eller ta kontakt med teknisk support.

## ADVARSEL

### Fare for at behandlingsmålet ikke oppnås på grunn av bevegelser som ikke er smidige

Kontroller at systemleddet utfører smidige bevegelser for å unngå forstyrrelser i leddfunksjonen. Bruk egnede glideskiver i henhold til opplysningene i denne bruksanvisningen.

---

## ADVARSEL

### **Fare for at behandlingsmålet ikke oppnås på grunn av feil innstilte fjærenheter**

Skru fjærenheten inn til systemfotbøylen, men ikke forhåndsstram fjærenheten. Dersom anslagene oppnås for tidlig eller for sent, vil bevegeligheten reduseres eller pasienten ikke stabiliseres tilstrekkelig ved hjelp av ortosen. Dette fører til at ganglaget forverres.

## ADVARSEL

### **Brudd på systemkomponenter ved bruddsikringsstedet på systemfotbøylen**

Hvis du må file inn systemfotbøylen, må du ta hensyn til opplysningene om bruddsikringssteder i denne bruksanvisningen. Slip langs lasermerkene på systemfotbøylen.

## MERK

### **Begrenset leddfunksjon på grunn av ukyndig montering**

Feil montering kan ha negativ innvirkning på leddfunksjonen. Ta spesielt hensyn til:

- at systemskinnen/systemmankeret kobles til systemboksen med riktig arbeidsteknikk
- at leddkomponentene kun smøres lett
- at vedlikeholdsintervallene overholdes

## MERK

### **Begrenset leddfunksjon på grunn av ukyndig fjerning av smuss**

Informér pasienten om hvordan ortosen og systemleddet må rengjøres for smuss på riktig måte.

## MERK

### **Begrenset leddfunksjon på grunn av manglende vedlikehold**

Overhold de oppgitte vedlikeholdsintervallene for å unngå forstyrrelser i leddfunksjonen. Informer også pasienten om vedlikeholdskontrollene som må overholdes. Noter den neste vedlikeholdskontrollen i servicepasset for ortosen til pasienten.

---

## 3. Bruk

### 3.1 Bruksformål

Systemkelledd fra FIOR & GENTZ er utelukkende beregnet på ortotisk behandling av nedre ekstremiteter. Systemleddene må kun brukes til konstruksjon av en AFO eller KAFO. Hvert systemledd påvirker ortosens funksjon og dermed også beinets funksjon. Systemleddet må utelukkende brukes til én behandling og må ikke gjenbrukes.

### 3.2 Indikasjon

Indikasjoner for behandling av nedre ekstremiteter med ortose er usikkerheter som fører til et patologisk gangbilde. Dette kan for eksempel være forårsaket av sentral, perifer, spinal eller nevromuskulær lammelse, strukturelt relaterte deformiteter / funksjonsfeil eller kirurgi.

De fysiske forutsetningene til pasienten, deriblant muskelstatus eller aktivitetsnivå, er avgjørende for ortotisk behandling. Det må evalueres om pasienten kan håndtere ortosen på en sikker måte.

Alle systemkelledd kan også brukes som en del av en protesebehandling for pasienter med delvis amputasjon av foten. I slike tilfeller skal den ortosen som ortopediteknikeren eller den kvalifiserte/utdannede eksperten har laget til pasienten (det spesialtilpassede produktet), kombineres med en fotprotese. Ytterligere informasjon er tilgjengelig i Guide to Partial Foot Amputations (se QR-koden fig. 1).



Fig. 1

### 3.3 Kontraindikasjon

Systemleddet er ikke egnet for behandling som ikke er beskrevet i avsnitt 3.2, som en behandling av øvre ekstremitet eller behandling med en protese eller ortoprotese, som ikke bare gjelder en del av foten, for eksempel etter amputasjon av beinsegmenter.

### 3.4 Kvalifikasjoner

Systemkneleddet må kun monteres av ortopediteknikere eller kvalifiserte/utdannede eksperter.

### 3.5 Bruk

Alle systemledd fra FIOR & GENTZ er blitt utviklet for aktiviteter i dagliglivet, som f.eks. å gå og stå. Ekstreme støtbelastninger, som f.eks. lengdehopp, klatring og fallskjermhopping, er utelukket.

---

### 3.6 Kombinasjonsmuligheter med andre systemledd

Systemankelleddet **NEURO VARIO-SWING** kan monteres med andre systemledd fra produktsortimentet til FIOR & GENTZ. Systemankelleddene **NEURO CLASSIC med plug + go-modularitet** og **NEURO VARIO-CLASSIC 2** og **NEURO VARIO 2** kan brukes som hengselledd.

Vi anbefaler at du bruker ortosekonfiguratoren når du skal velge alle systemkomponentene til ortosen, og at du tar hensyn til anbefalingene i konfigurasjonsresultatet.

## 4. Leddfunksjon

Systemankelleddet har følgende funksjoner på grunn av de brukte systemkomponentene:

Systemkomponent	Funksjoner
Fjærenhet (dorsal)	<ul style="list-style-type: none"><li>- fastsettelse av maksimal bevegelsesfrihet i plantarfleksjon</li><li>- integrert fotløftefunksjon</li><li>- muliggjør kontrollert senking av foten i <i>loading response</i></li></ul>
	<b>Bevegelsesbegrensningskrue:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- begrensnings av maksimal bevegelsesfrihet i plantarfleksjon</li></ul>

Systemkomponent	Funksjoner
Skruenheter	Innstilling av ortosekonstruksjonen



## 5. Leveringsinnhold

Betegnelse	Mengde
Systemankelledd (fig. 2)	1
dekkplatepresshjelp (fig. 3)	1
Ortoseleddfett, 3 g (ikke avbildet)	1
Monterings-/støpedummy (fig. 4)	1



Fig. 2

Tilhørende fjærenheter og systemfotbøyle må bestilles separat.



Fig. 3



Fig. 4

## 6. Bæreevne

Bæreevnen baseres på de relevante pasientdataene og kan beregnes ved hjelp av ortosekonfiguratoren. Vi anbefaler at du bruker systemkomponentene som oppgis av ortosekonfiguratoren for konstruksjon av ortosen, og at du følger den anbefalte arbeidsteknikken.

## 7. Verktøy for montering av systemleddet

Verktøy for systemleddskruer	Systembredde				
	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm
T10 Torx-nøkkel/-bits	x	-	-	-	-
T15 Torx-nøkkel/-bits	-	x	-	-	-
T20 Torx-nøkkel/-bits	-	-	x	x	x
Dreiemomentskrutrekker 1–6 Nm	x	x	x	x	x
Flattrekker 3,5 x 0,6 x 100 mm	x	x	x	x	x
Skrutrekker for Torx-skruer, 4 x 100 mm	x	x	-	-	-
Skrutrekker for Torx-skruer, 5 x 100 mm	-	-	x	x	x
Tang	x	x	x	x	x

Verktøy for presskrue	Systembredde				
	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm
T10 Torx-nøkkel/-bits	x	-	-	-	-
T15 Torx-nøkkel/-bits	-	x	-	-	-
T25 Torx-nøkkel/-bits	-	-	x	x	x

## 8. Montering av systemleddet

Systemleddet leveres i montert tilstand. Alle funksjonene kontrolleres på produksjonsstedet. For innbygging i ortosen og senere vedlikehold må systemleddet demonteres. For å kunne sikre optimal funksjon må du ta hensyn til monteringsrekkefølgen under. Stram til alle skruene med dreiemomentet som er oppgitt i avsnitt 8.7.

Du finner mer informasjon om montering i nettveiledningen **Joint Assembly System Ankle Joints with plug + go Modularity** (se QR-kode, fig. 5) på hjemmesiden til FIOR & GENTZ.



Fig. 5



Bruk bare ortoseleddfettet fra FIOR & GENTZ til smøring av systemkomponentene.

### 8.1 Demontering av dekkplaten

- 1 Skru ut begge senkeskruene.
- 2 Legg underlagsskiven på dekkplaten og skru presskruen inn i gjengene på den første skruen (S1). Presskruen må ikke skrues helt inn (fig. 6).
- 3 Skyv den øvre delen av leddet og dekkplaten fra hverandre ved å bruke kraft som vist (se pilene på fig. 6). Dette kan gjøres ved hjelp av en skrustikke eller med kontrollerte slag, f.eks. med en myk hammer.
- 4 Fjern presskruen og underlagsskiven igjen.

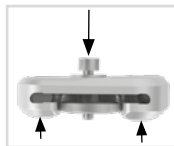


Fig. 6



Fig. 7

### 8.2 Montering av dekkplaten



Pass på at du ikke skader glideskiven under montering. Innklemt glideskivepartikler kan forårsake klaring på siden i systemleddet.

- 1 Rengjør gjengene til splittbolten og den øvre delen av leddet samt hullene i dekkplaten med LOCTITE® 7063 hurtigrenjoringsmiddel før montering. La gjengene lufttørke i 10 minutter.
- 2 Påfør spraylim på én side av den første glideskiven, og lim den inn i dekkplaten (fig. 7).
- 3 Smør den andre siden lett inn med ortoseleddfett.
- 4 Smør sidekontaktflatene til den øvre delen av leddet til dekkplaten med ortoseleddfett (fig. 8).
- 5 Monter dekkplaten ved at den presses sammen med presskruen og underlagsskiven (fig. 9).



Fig. 8

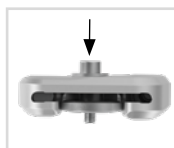


Fig. 9

- 6 Fjern presskruen og underlagsskiven igjen.
- 7 Skru inn den første senkeskruen (S1) (fig. 10).
- 8 Forsikre deg om at det ikke lenger er noe mellomrom mellom dekkplaten og den øvre delen av leddet (fig. 11).

### 8.3 Montering av systemfotbøylen

- 1 Smør ortoseleddfett på glideflatene på splittbolten samt kontaktflatene til systemfotbøylen mellom systemfotbøylen og fjærenheten eller skruenheten.
- 2 Smør inn den andre glideskiven lett på begge sider og sett den på systemfotbøylen (fig. 12).
- 3 Skyv systemfotbøylen ned fra mellom dekkplaten og den øvre delen av leddet. Sørg her for at glideskiven peker i retning øvre del av leddet og blir i riktig posisjon.
- 4 Sett splittbolten inn i den riktige fordypningen på den øvre delen av leddet. Splittbolten må sitte helt inne i fordypningen (fig. 13).
- 5 Skru inn den andre senkeskruen (akselskrue, S2) (fig. 14).

### 8.4 Kontroller at bevegelsene er smidige

Skru fast skruene på dekkplaten med riktig dreiemoment (se avsnitt 8.7). Kontroller at bevegelsene til systemleddet er smidige. Ved klaring på sidene må du bytte ut en glideskive med en litt tykkere glideskive. Ved manglende smidighet (leddet setter seg fast) må du bytte ut glideskiven med en litt tynnere glideskive.



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12

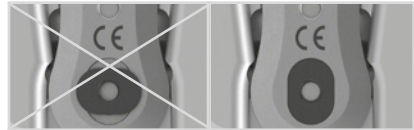


Fig. 13

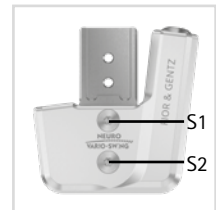


Fig. 14

## 8.5 Montering av skruenheten

- 1 Sett sammen anslagsdemperen/o-ringdemper (2) og glidehylsen (3) med stempelet (1) (fig. 15). Pass på at glidehylsen sitter riktig på stempelet (fig. 16).
- 2 Sett på trykkfjæren (4).
- 3 Sett stempelet (1) inklusive de påmonterte systemkomponentene (2, 3, 4) inn i fjærkanalen.
- 4 Skru strukturstillskruen (5; fig. 15) inn i fjærkanalen (fig. 17). Hold systemfotbøylen slik mot dekkplaten at systemleddet er innrettet i midten på innsiden av grademerkene. Skru skruenheten inn til trykkfjæren er fullstendig komprimert i systemfotbøylens holdte posisjon.

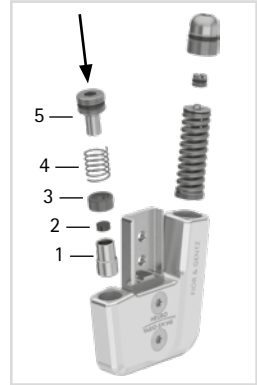


Fig. 15

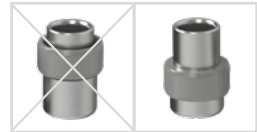


Fig. 16

## 8.6 Montering av fjærenheten

- 1 Sett skruenheten på fjærenheten (fig. 18).
- 2 Skru deretter fjærenheten for planarfleksjon inn i bakre fjærkanal (fig. 19) til den berører systemfotbøylen. Ikke forhåndsstram fjærenheten.



Fig. 17

**i** Hvis O-ringene til skruenheten fremdeles er synlig etter at du skrudd fjærenheten inn i systemleddet, må du kontrollere innstillingen til systemleddet og kontakte teknisk støtte om nødvendig.

- 3 Pass på at det ikke er klaring i systemleddet. Kontroller dette ved å bevege systemleddet litt i åp-rettning. Etterjuster om nødvendig.
- 4 Kontroller at systemleddet er justert innenfor grademerkene.



Fig. 18



Fig. 19

## 8.7 Sikring av skruene

Sikring av skruene skjer etter at ortosen er ferdig montert, prøvd ut av pasienten og før den overgis til pasienten.

- 1 Løsne skruene til dekkplaten (fig. 14) igjen etter at du har kontrollert at bevegelsene er smidig og fjern dem fra dekkplaten.
- 2 Påfør en liten dråpe LOCTITE® 243 (medium strength) på gjengene til skruene.
- 3 Sikre skruene til dekkplaten (fig. 14) med dreiemomentet som tilsvarer systembredden.
- 4 La limet herde (ferdig herdet etter ca. 24 timer).

Skruer for dekkplate	Systembredde				
	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm
Presskrue for dekkplatepresshjelp	2,5 Nm	4 Nm	6 Nm	6 Nm	6 Nm
Torx-senkeskrue (S1)	2,5 Nm	4 Nm	6 Nm	6 Nm	6 Nm
Torx-senkeskrue (Akselskrue, S2)	1,5 Nm	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm



Skrueene til dekkplaten er ikke sikret med riktig dreiemoment når produktet leveres. Opplysninger om dreiemomentene finner du også i nedsenkningene på dekkplaten.

## 9. Innstillingsmuligheter på ortosen

Ortosen kan tilpasses individuelt til pasientens behov med justerbare systemankelledd. Innstillingene som beskrives, har ingen innvirkning på hverandre og kan foretas uavhengig av hverandre.



Sørg for riktig innstilling av dorsalanslaget ved montering av systemankelleddet. Dorsalanslaget er avgjørende for resten av ortosens oppbygging. Du finner mer informasjon om dette i nettveiledningen **AFO Alignment Guidelines** (se QR-koden fig. 20) på hjemmesiden til FIOR & GENTZ.



Fig. 20

## 9.1 Justerbar struktur

Ortosens struktur kan tilpasses med strukturstillskruen (1; fig. 21) og skruenheten (4, fig. 21). Ta hensyn til at det maks. er tillatt med finjusteringer på 10°. Komprimer også trykkfjæren i skruenheten (4) når strukturen kontrolleres (fig. 21). Ikke forhåndsstram fjærenheten, ettersom det kan føre til skader på systemleddet.

Du kan øke og redusere vinkelen mellom leggen og foten (fig. 22):

- Hvis du vil øke vinkelen, dreier du først ut strukturstillskruen (1, fig. 21). Skru så inn skruenheten (4, fig. 21) til ønsket struktur er oppnådd. Skru den bakre fjærenheten ytterligere inn over strukturstillskruen for å unngå klaring i ap-retning ved behov.
- Hvis du vil redusere vinkelen, skrur du ut skruenheten (4, fig. 21) til ønsket struktur er oppnådd. Skru så inn strukturstillskruen (1, fig. 21) med fjærenheten til det ikke lenger er klaring i ap-retning.

Stempelet til skruenheten må ikke miste kontakten med systemfotbøylen under hele bevegelsesforløpet (maks. 15° i plantarfleksjon), ettersom det ellers vil oppstå lyder.

## 9.2 Justerbar bevegelsesfrihet

Bevegelsesbegrensningsskruen (2; fig. 21) muliggjør trinnløs endring av bevegelsesfriheten i plantarfleksjon. Alle fjærenheter er stilt inn med maks. mulig bevegelsesfrihet. De finnes i trinn på 5°, 10° og 15°. Ved å skru inn bevegelsesbegrensningsskruen kan den maksimale bevegelsesfriheten begrenses eller blokkeres helt (fig. 23).

## 9.3 Justerbar fjærstyrke

Fjærstyrken kan endres ved å bytte fjærenhetene (3; fig. 21). Avhengig av nødvendig fjærstyrke må du sette den passende fjærenheten inn i fjærkanalen. Det finnes fem fjærenheter med fjærkraft fra normal til ekstra kraftig (fig. 24). Vær oppmerksom på at fjærenheten avgjør maksimalt mulig bevegelsesfrihet.

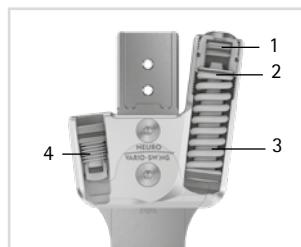


Fig. 21

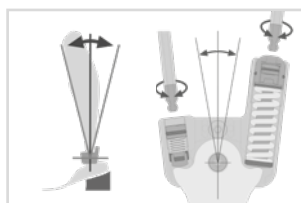


Fig. 22

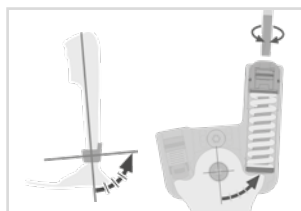


Fig. 23

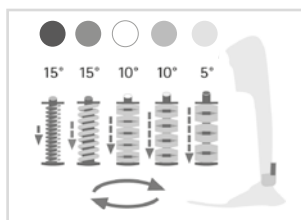


Fig. 24

## 9.4 Avlesing av leddvinkel

Det finnes merker på alle systemledd og systemfotbøyer (fig. 25) som viser vinkelen mellom systemkomponentene. Slik kan du kontrollere den individuelle grunninnstillingen (ortosens grunnleggende oppbygging), dokumentere den viste leddvinkelen og sammenligne avvik i etterkant. Leddvinkelen i den individuelle grunnposisjonen må ikke ligge utenfor grademerkene.

Du finner avstandene mellom grademerkene for de enkelte systembreddene i tabellen nedenfor.

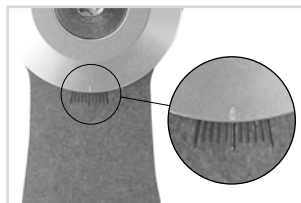


Fig. 25

Grademerker					
Systembredde	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm
Grad	5°	5°	2°	2°	2°

## 10. Merknader om produksjon av ortosen

### 10.1 Forbindelse til systemskinne/ systemanker

Systemskinnen/systemankeret må limes eller skrues fast og vikles sammen med systemleddet i henhold til arbeidsteknikken som ble fastsatt under planleggingen (fig. 26–28).

Du finner mer informasjon i **Bruksanvisning for ortopediteknikere eller kvalifiserte/utdannede eksperter Systemskinner og systemankere** (se QR-kode, fig. 29).



Fig. 26



Fig. 27



Fig. 28

### 10.2 Sliping av ortosedeler

Etter at ortosedelene er blitt herdet, må du slipe ned laminatkantene. Pass på at du ikke sliper ned sidekantene til den øvre delen av leddet når du gjør dette. Da kan passformen mellom den øvre delen av leddet og dekkplaten ødelegges, noe som fører til mekanisk støy og brudd på passkilene med stift.

Du finner informasjon om arbeidsteknikkene på hjemmesiden til FIOR & GENTZ under "Online Tutorials".



Fig. 29

## 11. Ombygging av systemankelledd

Dersom du ikke har behov for andre utstyrsalternativer for ombygging, kan du file bort nesene langs den loddrette linjen (fig. 32) på systemfotbøylene fullstendig.

## 11.1 Alternativer for ombygging med plug + go-modularitet

NEURO VARIO-SWING er utstyrt med plug + go-modularitet. Systemankelleddene med plug + go-modularitet har likt utformede systemfotbøyer, leddoverdelene og monterings-/støpedummyer og kan enkelt byttes ut med hverandre. De funksjonelle forskjellene ligger i funksjonsenheten. Du finner mer informasjon om alternativer for ombygging i nettveiledningen Joint Conversion System Ankle Joints with plug + go Modularity (se QR-kode, fig. 30) på hjemmesiden til FIOR & GENTZ. Følgende systemankelledd er utstyrt med plug + go-modularitet:



Fig. 30

- NEURO CLASSIC med plug + go-modularitet
- NEURO VARIO-CLASSIC 2
- NEURO VARIO 2
- NEURO VARIO-SPRING 2
- NEURO VARIO-SWING
- NEURO SWING-CLASSIC
- NEURO SWING
- NEURO SWING 2
- NEURO HiSWING

### 11.1.1 Ombygging med plug + go-modularitet

Trinn 2 er kun nødvendig for en ombygging av systemleddet NEURO HiSWING.

- 1 Demonter funksjonsenheten eller dekkplaten.
- 2 Monter vateret lateralt på lårskalet.
- 3 Monter funksjonsenheten til det systemleddet du vil bruke, i passende systembredde (se eksempel i fig. 31).



Fig. 31

### 11.2 Ombyggingsalternativer uten plug + go-modularitet

Systemankelleddet NEURO VARIO-SWING kan ombygges til en fritt bevegelig NEURO CLASSIC gjennom valgfri innfiling av systemfotbøylen og utskifting av dekkplaten.

#### 11.2.1 Ombygging uten plug + go-modularitet

- 1 Fil bort nesene på de lodrette laserlinjene fullstendig (fig. 33). Dette har kun optiske formål – funksjonen opprettholdes selv uten at nesene files bort.
- 2 Demonter dekkplaten.
- 3 Monter dekkplaten til systemleddet fritt bevegelig NEURO CLASSIC i den passende systembredden (se eksempel fig. 33).

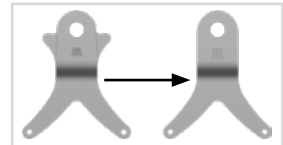


Fig. 32

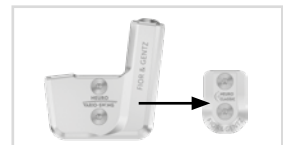


Fig. 33



## 12. Vedlikehold

Kontroller systemleddet regelmessig for slitasje og funksjonsdyktighet. Spesielt leddkomponentene som er oppført i tabellen nedenfor, må kontrolleres for de mulige problemene som står beskrevet, og treff nødvendige tiltak ved behov. Kontroller også riktig funksjon etter hvert vedlikehold. Systemleddet må kunne bevegges uten problemer og unormale lyder. Pass på at det ikke er klaring på siden og rundt aksen.

Leddkomponent	Mulig problem	Tiltak	Kontroll eller bytte ved behov*	Seneste bytte
Anslagsdemper/ O-ringdemper**	Slitasje	Bytt ut anslagsdemper/ O-ringdemper	Hver 6. måned	Hver 6. måned
O-ring til sikring av strukturstillskruen**	Slitasje	Bytt ut o-ring	Hver 6. måned	Hver 6. måned
O-ring til fiksering av fjærenheten	Slitasje	Bytt ut o-ring	Hver 6. måned	Hver 6. måned
Fjærenhet	Slitasje	Bytt ut fjærenheten	Hver 6. måned	Hver 18. måned
	Tallerkenfjærene kan skli ut (fig. 36)	Rett opp posisjonen til tallerkenfjærene med en tang	Hver 6. måned	Hver 18. måned
	Lyder i fjærenheten med trykkfjær	Smør trykkfjæren med ortoseleddfett eller sprayolje (art.-nr. FT3000-15)	Hver 6. måned	Hver 18. måned
	Lyder i fjærenheten med tallerkenfjærer	Smør sidene til tallerkenfjærene med sprayolje (art.-nr. FT3000-15)	Hver 6. måned	Hver 18. måned
Trykkfjær**	Slitasje	Bytt ut trykkfjæren	Hver 6. måned	Hver 18. måned
Glidekontakt (stempel)**	Slitasje	Bytt ut glidekontakt	Hver 6. måned	Hver 18. måned
Glidekontakt (systemfotbøyle)	Slitasje	Bytt ut glidekontakt	Hver 6. måned	Hver 18. måned
O-ring til sikring av bevegelsesbegrensnings- skskruen**	Slitasje	Bytt ut o-ring	Hver 6. måned	Hver 18. måned
Glideskive	Slitasje	Bytt ut glideskiven, se avsnitt 12.3	Hver 6. måned	Hver 18. måned
Dekkplate**	Slitasje	Bytt ut dekkplaten	Hver 6. måned	Hver 36. måned
Torx-senkeskrue**	Slitasje	Bytt ut senkeskruen	Hver 6. måned	Hver 36. måned
Splittbolt	Slitasje	Bytt ut splittbolt	Hver 6. måned	Hver 36. måned
Passkile med stift	Brudd	Bytt ut passkile med stift	Hver 6. måned	Hver 36. måned
Stempel**	Slitasje	Bytt ut stempel	Hver 6. måned	Hver 36. måned
Funksjonsenhet***	Slitasje eller funksjonstap	Bytte ut funksjonsenheten	Hver 6. måned	Hver 36. måned
Systemfotbøyle	Slitasje eller brudd	Bytt ut systemfotbøylen	Hver 6. måned	Hver 48. måned

\* avhengig av vurderingen til distributøren av det spesialtilpassede produktet i forhold til pasientens bruksatferd

\*\* del av funksjonsenheten

\*\*\* systemkomponenter som følger med kan også byttes separat

Rengjør gjengene til splittbolten og den øvre delen av leddet samt hullene i dekkplaten med LOCTITE® 7063 hurtigrengjøringsmiddel. La gjengene lufttørke i 10 minutter.

Etter alt vedlikeholdsarbeid må skruene til dekkplaten sikres med riktig dreiemoment og LOCTITE® 243 (medium strength) (se avsnitt 8.7). Fjern først alle limrester.

De individuelle vedlikeholdsplanene for systemleddene er tilgjengelige i Nedlasting-området (se QR-kode, fig. 34) på nettstedet til FIOR & GENTZ.



Fig. 34

## 12.1 Dokumentasjon av vedlikehold i servicepasset for ortosen

Når ortosen blir utlevert, får pasienten et servicepass for ortosen (fig. 35) fra ortopediteknikeren eller en kvalifisert/utdannet ekspert. For å opprettholde funksjonen og pasientens sikkerhet, må ortosen kontrolleres regelmessig i henhold til informasjonen i vedlikeholdsplanen. Datoene for vedlikeholdskontroller noteres og bekreftes i servicepasset for ortosen.



Fig. 35

## 12.2 Vedlikehold av tallerkenfjærene

Vær spesielt nøye med å kontrollere tallerkenfjærene under vedlikehold (fig. 36–37). Vi anbefaler å smøre tallerkenfjærenes sider med sprayolje (art. nr. FT3000-15) ved hvert vedlikehold og å justere dem på nytt ved behov for å forlenge fjærenhetens levetid. Bytt ut fjærenheten ved behov for å opprettholde riktig funksjon for systemleddet.

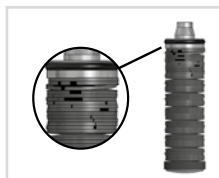


Fig. 36

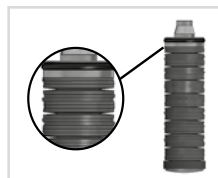


Fig. 37

### 12.3 Utsifting av glideskivene

Glideskivene finnes i forskjellige tykkelser (GS1407-040 er f.eks. 0,40 mm tykk). Alle tykkelsene har forskjellige merker (fig. 38). Du finner artikkelnummeret til de forhåndsmonterte glideskivene på baksiden av denne bruksanvisningen.

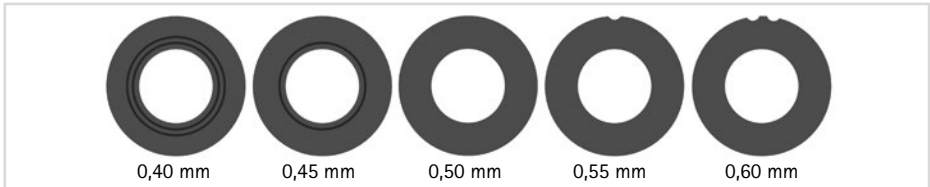


Fig. 38

### 12.4 Fjerning av smuss

Systemleddet må rengjøres for smuss ved behov og regelmessig utført vedlikehold. For å gjøre dette må du demontere systemleddet og rengjøre de tilsmussede systemkomponentene med en tørr klut.

## 13. Brukstid

For å kunne garantere sikker bruk og riktig funksjon samt en ubegrenset levetid for systemleddene må du overholde følgende:

- Overhold alltid de oppgitte vedlikeholdsintervallene, og dokumenter vedlikeholdet (se avsnitt 12).
- Overhold de spesifiserte vedlikeholdsmodalitetene (se avsnitt 12).
- Kontroller slitasjedelene slik det står spesifisert, og bytt dem ut i definerte intervaller (se avsnitt 12).
- Kontroller innstillingen til systemleddet under vedlikehold, og korrigjer innstillingen ved behov (se avsnitt 12).
- Kontroller at systemleddet fungerer som det skal ved gjennomføring av vedlikeholdet (se avsnitt 12).
- Den maksimale belastningen som beregnes når du planlegger det spesialtilpassede produktet, må ikke overskrides ved at pasientdata endres (f.eks. ved vektøkning, vekst eller økt aktivitetsnivå). Hvis den beregnede maksimale belastningen for systemleddet overskrides, kan ikke systemleddet lenger brukes. Ta hensyn til forventede endringer i pasientdata når du planlegger det spesialtilpassede produktet.
- Brukstiden til systemleddene opphører med brukstiden til det spesialtilpassede produktet (ortosen).
- Det er ikke tillatt å bruke et systemledd flere ganger i andre spesialtilpassede produkter (se avsnitt 19).

## 14. Oppbevaring

Det anbefales at systemleddet oppbevares i den originale emballasjen frem til den spesialtilpassede ortosen skal lages.

## 15. Reservedeler

### 15.1 Detaljert tegning av NEURO VARIO-SWING

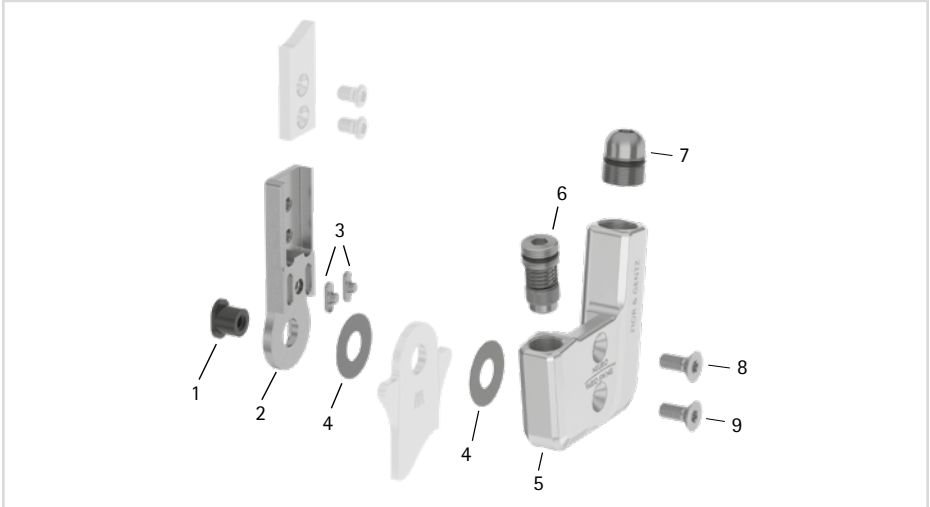


Fig. 39

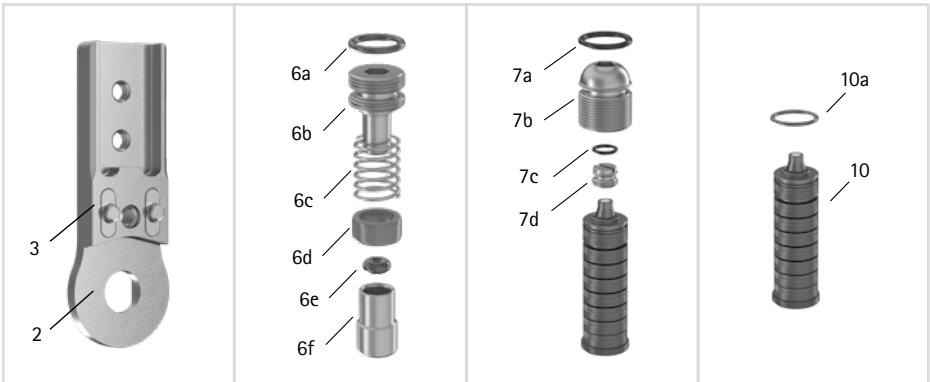


Fig. 40

Alle systemfotbøyer til systemankelledd NEURO VARIO-SWING leveres med integrert glidekontakt.

## 15.2 Reservedeler for systemankelleddet NEURO VARIO-SWING

Pos.	Artikkelnummer for systembredde					Betegnelse
	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	
1	SB6039-L0580	SB7049-L0590	SB8559-L0630	SB9669-L0760	SB1069-L0960	Spiltbolt
2-3	SF0310-P/ST	SF0311-P/ST	SF0312-P/ST	SF0313-P/ST	SF0315-P/ST	Øvre del med passkiler, rett, stål
2-3	-	SF0311-P/TI	SF0312-P/TI	SF0313-P/TI	SF0315-P/TI	Øvre del med passkiler, rett, titan
2-3	SF0330-P/ST	SF0331-P/ST	SF0332-P/ST	SF0333-P/ST	SF0335-P/ST	Øvre del med passkiler, bøyd innover, stål
2-3	-	SF0331-P/TI	SF0332-P/TI	SF0333-P/TI	SF0335-P/TI	Øvre del med passkiler, bøyd innover, titan
2-3	SF0330-8P/ST	SF0331-8P/ST	SF0332-8P/ST	SF0333-8P/ST	SF0335-8P/ST	Øvre del med passkiler, bøyd utover, stål
2-3	-	SF0331-8P/TI	SF0332-8P/TI	SF0333-8P/TI	SF0335-8P/TI	Øvre del med passkiler, bøyd utover, titan
3	SF0390-01	SF0391-01	SF0392-02	SF0393-02	SF0395-02	Passkile med stift
4	GS1206-*	GS1407-*	GS2009-*	GS2210-*	GS2611-*	Glideskive*
5	SH0460-L/AL	SH0461-L/AL	SH0462-L/AL	SH0463-L/AL	SH0465-L/AL	Dekkplate, venstre lateralt eller høyre medialt
5	SH0460-R/AL	SH0461-R/AL	SH0462-R/AL	SH0463-R/AL	SH0465-R/AL	Dekkplate, venstre medialt eller høyre lateralt
6	SC9607-L04	SC9608-L06	SC9611-L08	SC9612-L08	SC9612-L08	Skruenhet
6a	VE3771-04/10	VE3771-050/10	VE3771-08/15	VE3771-09/15	VE3771-09/15	O-ring til sikring av oppbyggingsstillskruen
6b	SC9607-L04/S	SC9608-L06/S	SC9611-L08/S	SC9612-L08/S	SC9612-L08/S	Oppbyggingsstillskrue, stål
6c	FE1615-01	FE1611-01	FE1916-01	FE1027-01	FE1027-01	Trykkfjær
6d	GS0604-350	GS0705-525	GS1007-350	GS1108-500	GS1108-500	Glidekontakt
6e	PN0003-L02	PN0004-L02	-	-	-	Anslagsdemper
6e	-	-	VE3771-010/20	VE3771-012/26	VE3771-012/26	O-ringdemper
6f	SH0490-01	SH0491-01	SH0492-01	SH0493-01	SH0493-01	Stempel
7	SC9609-L13	SC9611-L14	SC9612-L15	SC9614-L17	SC9618-L17	Skruenhet
7a	VE3771-06/11	VE3771-08/15	VE3771-09/15	VE3771-11/15	VE3771-125/15	O-ring til sikring av oppbyggingsstillskruen
7b	SC9609-L13/S	SC9611-L14/T	SC9612-L15/T	SC9614-L17/T	SC9618-L17/T	Strukturstillskrue

Pos.	Artikkelnummer for systembredde					Betegnelse
	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	
7c	VE3771-03/10	VE3771-04/10	VE3771-04/10	VE3771-04/10	VE3771-07/10	O-ring til sikring av bevegelsesbegrensningskruen
7d	SC9606-L05	SC9607-L06	SC9607-L06	SC9607-L06	SC9611-L06	Bevegelsesbegrensningskruer
8	SC1403-L08	SC1404-L10	SC1405-L11	SC1405-L12	SC1405-L14	Torx-senkeskrue
9	SC1403-L08	SC1404-L10	SC1405-L11	SC1405-L12	SC1406-L14	Torx-senkeskrue (akselskrue)
5-9	SH4970-L/AL	SH4971-L/AL	SH4972-L/AL	SH4973-L/AL	SH4975-L/AL	Funksjonsenhet plug + go-modularitet, venstre lateralt eller høyre medialt
5-9	SH4970-R/AL	SH4971-R/AL	SH4972-R/AL	SH4973-R/AL	SH4975-R/AL	Funksjonsenhet plug + go-modularitet, venstre medialt eller høyre lateralt

* Glideskiver				
Artikkelnummer for systembredde				
10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm
Ø = 12 mm	Ø = 14 mm	Ø = 20 mm	Ø = 22 mm	Ø = 26 mm
GS1206-040	GS1407-040	GS2009-040	GS2210-040	GS2611-040
GS1206-045	GS1407-045	GS2009-045	GS2210-045	GS2611-045
GS1206-050	GS1407-050	GS2009-050	GS2210-050	GS2611-050
GS1206-055	GS1407-055	GS2009-055	GS2210-055	GS2611-055
GS1206-060	GS1407-060	GS2009-060	GS2210-060	GS2611-060

### 15.3 Fjærenheter

Pos.	Artikkelnummer for systembredde					Betegnelse
	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	
10	SF5800-15/02	SF5801-15/03	SF5802-15/05	SF5803-15/07	SF5805-15/18	Fjærenhet, blå, normal, maks. 15° bevegelsesfrihet
10	SF5800-15/04	SF5801-15/06	SF5802-15/11	SF5803-15/15	SF5805-15/25	Fjærenhet, grønn, middels, maks. 15° bevegelsesfrihet
10	SF5800-10/06	SF5801-10/12	SF5802-09/16	SF5803-10/21	SF5805-10/40	Fjærenhet, hvit, sterk, maks. 10° bevegelsesfrihet
10	SF5800-10/09	SF5801-10/19	SF5802-10/29	SF5803-10/31	SF5805-10/60	Fjærenhet, gul, svært sterk, maks. 10° bevegelsesfrihet
10	SF5800-05/17	SF5801-05/33	SF5802-05/53	SF5803-05/63	SF5805-05/99	Fjærenhet, rød, ekstra sterk, maks. 5° bevegelsesfrihet
10a	VE3771-045/10	VE3771-06/10	VE3771-07/10	VE3771-08/10	VE3771-11/10	O-ring til fiksering av fjærenheten

## 16. Kassering

Sørg for at systemleddet og enkeltkomponentene avfallshåndteres på forskriftsmessig måte. Produktet skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall (fig. 41). Ta hensyn til gjeldende nasjonale lovbestemmelser og lokale forskrifter for riktig gjenvinning av resirkulerbare stoffer.

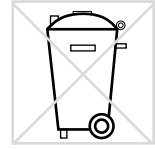


Fig. 41



Systemleddet må demonteres fra ortosen før det leveres til forskriftsmessig avfallshåndtering.

## 17. Symbolforklaring



CE-merket iht. forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr



Medisinsk utstyr



Artikkelnummer



Produsent



Produksjonsnummer



Følg bruksanvisningen



Enkelt pasient – flergangsbruk



Unique Device Identifier – produktidentifiseringsnummer



---

## 18. CE-samsvar

Vi erklærer at vårt medisinske utstyr og vårt tilbehør til medisinsk utstyr er i samsvar med kravene i direktiv (EU) 2017/745. Produktene merkes med CE-merket av FIOR & GENTZ.

## 19. Rettslig informasjon

Ved kjøp av dette produktet gjelder våre generelle vilkår for forretning, salg, levering og betaling. Garantien bortfaller blant annet dersom produktet har blitt montert flere ganger. Vi gjør oppmerksom på at produktet ikke må kombineres med andre komponenter eller materialer enn det som oppgis i konfigurasjonsresultatene til ortosekonfiguratoren fra FIOR & GENTZ. Bruk av produktet sammen med produkter fra andre produsenter er ikke tillatt.

Opplysningene i bruksanvisningen refererer til gjeldende status ved tidspunktet de ble trykt. Produktopplysningene er veiledende verdier. Med forbehold om tekniske endringer.

Alle opphavsrettigheter, spesielt rettigheten til distribusjon, mangfoldiggjøring og oversettelse, forbeholdes utelukkende FIOR & GENTZ Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb von orthopädietechnischen Systemen mbH. Reproduksjoner, kopier og annen elektronisk mangfoldiggjøring kan ikke lages, selv delvis, uten skriftlig tillatelse fra FIOR & GENTZ Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb von orthopädietechnischen Systemen mbH.

---

## 20. Informasjon for behandlingsdokumentasjon

Fest dette bruksanvisningen til behandlingsdokumentasjonen!

### Pasientdata

Navn	
Gate	
Postnummer, sted	
Telefon privat	
Telefon arbeid	
Kostnadsbærer	
Medlemsnummer	
Behandler lege	
Diagnose	

## 21. Overlevering av ortosen

Ortopedteknikeren eller den kvalifiserte/utdannede ekspertene ga deg som pasient, forelder eller omsorgsperson også bruksanvisningen for pasienter samt servicepasset for ortosen da ortosen ble overlevert. Du fikk en nøye forklaring på funksjonen til og håndteringen av ortosen ved hjelp av denne bruksanvisningen. I servicepasset for ortosen finner du den neste datoen for vedlikeholdskontroll. Ta med servicepasset for ortosen til hver vedlikeholdskontroll.



\_\_\_\_\_  
Sted, dato

\_\_\_\_\_  
Pasientens underskrift

Benside

venstre

høyre

Montert glideskive

1. GS \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

2. GS \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

