

P1

La ortesis
antiequino dinámica de carbono



Indicación

- Disfunciones de los dorsiflexores

Contraindicación


- Espasticidad media a severa

Ventajas para el paciente


- Ortesis antiequino con dinámica y funcionalidad alta
- Mantiene el pie en una posición funcional de 90° evitando tropiezos causados por debilidad de la flexión dorsal del pie
- Satisface las más altas exigencias de comodidad
- También ideal para corredores activos
- Gracias a la construcción fina se puede llevar discretamente en calzado normal



Adaptable al paciente

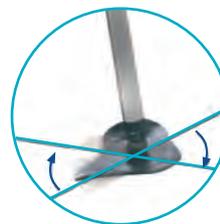

Flexibilidad parcial óptima del antepié en suelos irregulares

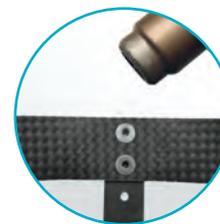

Banda de pantorrilla de fibra de carbono termoformable



La plantilla de fibra de carbono muy fina y parcialmente flexible se adapta a suelos irregulares con respeto a la pronación y supinación.



La construcción de la plantilla de fibra de carbono permite adaptar la pletina flexible al paciente en la zona del talón.



Pletina flexible dorsal de acero de alta resistencia con perforaciones para la fijación de la banda de pantorrilla.



Banda de pantorrilla termoformable que sujeta la ortesis al medio de la pantorrilla.



Plantilla de almohadillado adaptable para acolchar la plantilla de fibra de carbono.



Cinta de velcro almohadillada con pasador integrado para la fijación segura de la ortesis en la pierna.

Ortesis antiequino de carbono P1, kit

Referencia	Talla	No. del calzado	Pierna
PO1100-S/L	S	35 - 37	izquierda
PO1100-S/R	S	35 - 37	derecha
PO1100-M/L	M	38 - 40	izquierda
PO1100-M/R	M	38 - 40	derecha
PO1100-L/L	L	41 - 43	izquierda
PO1100-L/R	L	41 - 43	derecha
PO1100-XL/L	XL	44 - 46	izquierda
PO1100-XL/R	XL	44 - 46	derecha

Contenido del envío: 1 x ortesis antiequino de carbono P1 con banda de pantorrilla, plantilla de almohadillado, tubo termocontráctil y cinta de velcro con pasador y almohadilla

Ortesis antiequino de carbono P1 sin accesorio Para la producción de ortesis antiequino individuales

Referencia	Talla	No. del calzado	Pierna
P00110-S/L	S	35 - 37	izquierda
P00110-S/R	S	35 - 37	derecha
P00110-M/L	M	38 - 40	izquierda
P00110-M/R	M	38 - 40	derecha
P00110-L/L	L	41 - 43	izquierda
P00110-L/R	L	41 - 43	derecha
P00110-XL/L	XL	44 - 46	izquierda
P00110-XL/R	XL	44 - 46	derecha

Banda de pantorrilla de fibra de carbono P1

Referencia	Talla	Circunferencia de pantorrilla* [cm]	Color
P00101-M	S/M	29 - 36	negro
P00101-XL	L/XL	37 - 44	negro

* en la parte más ancha de la pantorrilla

Plantilla de almohadillado P1 con puntos adhesivos

Referencia	Denominación	Color	No. del calzado
P00300-L	plantilla de almohadillado	negro	35 - 46
P00300-R	plantilla de almohadillado	negro	35 - 46

Cinta de velcro P1 con pasador y almohadilla

Referencia	Denominación	Color
KV2004-L450	cinta de velcro para P1 - talla S y M	negro
KV2004-L500	cinta de velcro para P1 - talla L	negro
KV2004-L550	cinta de velcro para P1 - talla XL	negro