

NEURO MATIC –

Assicurazione della fase di appoggio meccanica



NEURO MATIC – Assicurazione della fase di appoggio meccanica



Per ortesi realizzate su misura

Posizione eretta e deambulazione normale di nuovo possibili grazie all'assicurazione della fase di appoggio

Sicurezza in ogni situazione

L'articolazione ortesica stabilizza il ginocchio nella fase di appoggio in caso di sovraccarico a partire dalla risposta a carico, consentendo così al ginocchio un movimento libero in fase di oscillazione.

3 possibilità di regolazione tramite la leva di sicurezza

- Auto – automatica con movimento libero/bloccata, meccanica
- Free – regolazione per situazioni in cui l'articolazione dovrebbe avere movimento libero permanente, ad es. andare in bici.
- Lock – blocco permanente, meccanico

Guarda il video funzionale



Scannerizza il codice QR per ulteriori informazioni



NEURO MATIC – Controllo dell'articolazione attraverso il collegamento all'articolazione tibiotarsica

Il movimento nell'articolazione tibiotarsica porta al blocco e allo sblocco dell'articolazione per ginocchio NEURO MATIC.




NEURO MATIC



Desiderate realizzare per i vostri pazienti un'ortesi con l'articolazione per ginocchio modulare **NEURO MATIC**?

Utilizzate il configuratore ortesico per assemblare in totale autonomia i componenti modulari di un'ortesi con **NEURO MATIC**.

Il configuratore ortesico individua i componenti modulari adeguati al paziente sulla scorta dei dati di quest'ultimo e tenendo in considerazione la capacità di carico.

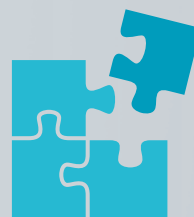

Configuratore
ortesico

www.orthosis-configurator.com/it