

# AKTUALISIERUNGSDOKUMENTATION

## Änderungsprotokoll: NEURO TRONIC Multifunktionsgerät (ET3830-T) und Steuereinheit (ET3830)

**Multifunktionsgerät-Update: Version 4.03.02 (2018.11.21)**

**Steuereinheiten-Update: Version 2.69 (2018.11.21)**

*Problembhebung:* verbesserte Datenverarbeitung in e-Motion

**Multifunktionsgerät-Update: Version 4.03.01 (2018.11.08)**

**Steuereinheiten-Update: Version 2.68 (2018.11.08)**

*Problembhebung:* verringerte Empfindlichkeit des Moduswechsels im Stillstand

**Multifunktionsgerät-Update: Version 4.03.00 (2018.09.17)**

*Neu:* Einstellung *mid stance*, Einstellung *terminal swing*

**Steuereinheiten-Update: Version 2.67 (2018.09.17)**

*Neu:* Einstellung *mid stance*, Einstellung *terminal swing*, Moduswechsel nur im Stillstand

**Multifunktionsgerät-Update: Version 4.01.06 (2018.05.17)**

**Steuereinheiten-Update: Version 2.66 (2018.05.17)**

*Neu:* Einstellbarer Entriegelungszeitpunkt

**Multifunktionsgerät-Update: Version 4.01.04 (2017.05.05)**

Keine Änderung, nur eine neue Version der Steuereinheit ET3830: v.2.65.

**Steuereinheiten-Update: Version 2.65 (2017.05.05)**

*Problembhebung:* Im Auto-Modus schaltet die Steuereinheit bei niedrigem Akkustatus nicht mehr in den Free-Modus, sondern bleibt gesperrt.

Verbesserte Reaktion der Steuereinheit auf Funksignale.

**Multifunktionsgerät-Update: Version 4.01.03 (2014.12.22)**

Die Signalfunktion ist nun nach einem Update automatisch eingeschaltet.

**Multifunktionsgerät-Update: Version 4.01.02 (2014.12.12)**

Die Batterieprüfung während der Durchführung eines Steuereinheiten-Updates wurde verbessert.

**Steuereinheiten-Update: Version 2.64 (2014.12.12)**

*Problembhebung:* Wenn Toneinstellungen verändert wurden, reagierte der Auto-Modus manchmal nicht mehr.

**Multifunktionsgerät-Update: Version 4.01.01 (2014.09.25)**

Die Akkus müssen für ein Update vollständig geladen sein.

**Steuereinheiten-Update: Version 2.61 (2014.09.25)**

*Neu:* Signalfunktion für p-Motion verfügbar.

*Problembhebung:* Die Kalibrierung wurde verbessert (Signalfilter).

Die Sicherheit in e-Motion wurde verbessert.

**Multifunktionsgerät-Update: Version 4.01.00 (2014.09.10)**

*Neu:* Signalfunktion für p-Motion verfügbar.

**Steuereinheiten-Update: Version 2.60 (2014.09.10)**

*Problembhebung:* Das Gelenk schaltete ungewollt von e-Motion auf p-Motion um.

*Neu:* Einstellungen werden jetzt auf einer externen Speichereinheit (für höhere Zuverlässigkeit) gesichert.

Die Akkus der Steuereinheit müssen für ein Update vollständig geladen sein.

Die Schrittzahl in e-Motion wird häufiger gespeichert.

**Multifunktionsgerät-Update: Version 4.00.10 (2014.07.11)**

**Steuereinheiten-Update: Version 2.52 (2014.07.11)**

Die Kalibrierung der Steuereinheit wurde geringfügig angepasst.

Die e-Motion-Technologie wurde verbessert.

**Multifunktionsgerät-Update: Version 4.00.09 (2013.10.29)**

**Steuereinheiten-Update: Version 2.50 (2013.10.29)**

Die Steuereinheit wurde für besseren Widerstand gegen Stöße/Schläge mit einer Erschütterungserkennung ergänzt.

**Multifunktionsgerät-Update: Version 4.00.08 (2013.10.31)**

*Problembhebung:* Es erschien eine falsche Mitteilung, wenn der Benutzer versuchte eine alte, nicht aktualisierungsfähige Steuereinheit zu aktualisieren.

Kleine Rechtschreibfehler wurden beseitigt.

**Multifunktionsgerät-Update: Version 4.00.07 (2013.10.24)**

Kleine Rechtschreibfehler wurden beseitigt.

**Änderungsprotokoll: NEURO TRONIC Multifunktionsgerät (ET3840-T), Steuereinheit (ET3830, ET3840, ET3845) und Fernbedienung (ET3840-P)**

**Multifunktionsgerät-Update: Version 5.03.03 (2018.12.17)**  
**ET3840-P Patienten-Fernbedienung-Update: Version 1.0.11 (2018.12.17)**  
*Problembhebung: unstabile Verbindung mit Steuereinheit*

**Multifunktionsgerät-Update: Version 5.03.02 (2018.11.21)**  
*Problembhebung: Fehlerbehebung im Aktualisierungsverfahren*  
*Problembhebung: Menüpunkt Akkuqualität war manchmal nicht erreichbar*  
**ET3830 Steuereinheiten-Update: Version 2.69 (2018.11.21)**  
*Problembhebung: verbesserte Datenverarbeitung in e-Motion*

**Multifunktionsgerät-Update: Version 5.03.01 (2018.11.08)**  
**ET3830 Steuereinheiten-Update: Version 2.68 (2018.11.08)**  
**ET3840 Steuereinheiten-Update: Version 3.00.41 (2018.11.08)**  
**ET3845 Steuereinheiten-Update: Version 3.00.41 (2018.11.08)**  
*Problembhebung: verringerte Empfindlichkeit des Moduswechsels im Stillstand*

**Multifunktionsgerät-Update: Version 5.03.00 (2018.09.17)**  
*Neu: Einstellung *mid stance*, Einstellung *terminal swing**  
**ET3830 Steuereinheiten-Update: Version 2.67 (2018.09.17)**  
**ET3840 Steuereinheiten-Update: Version 3.00.40 (2018.09.17)**  
**ET3845 Steuereinheiten-Update: Version 3.00.40 (2018.09.17)**  
*Neu: Einstellung *mid stance*, Einstellung *terminal swing*, Moduswechsel nur im Stillstand*  
**ET3840-P Fernbedienungsupdate: Version 1.00.10 (2018.09.14)**  
*LED-Signale wurden an die Bedienungsanleitung angepasst.*

**Multifunktionsgerät-Update: Version 5.00.06 (2018.05.17)**  
*Keine Änderung, nur eine neue Version der Steuereinheit ET3830: v.2.66.*  
**ET3830 Steuereinheiten-Update: Version 2.66 (2018.05.17)**  
*Neu: Einstellbarer Entriegelungszeitpunkt*