

Systemfußbügel austauschen

In diesem Online-Tutorial zeigen wir wie Sie einen Systemfußbügel austauschen, indem Sie ein neues Fußteil anfertigen, ohne dabei die gesamte Orthese neu bauen zu müssen. Dafür können Sie ein vorhandenes Gipsmodell als Grundlage verwenden oder ein neues (ggf. auf Basis des alten) erstellen.

Wir bieten Ihnen zudem weiterführende Online-Tutorials mit näheren Informationen zur Herstellung eines [teilstabilen](#), [stabilen](#) oder [schmalen](#) Fußteiles oder zum [Schränken der Systemfußbügel](#).

Da für verschiedene Systemgelenke dasselbe Werkzeug und ähnliche Arbeitsschritte nötig sind, zeigen wir die Vorgehensweise jeweils an einem Beispiel für mehrere Systemgelenke.

Am Beispiel NEURO SWING 2:

NEURO CLASSIC, NEURO CLASSIC-SPRING, NEURO CLASSIC-SWING, NEURO HiSWING, NEURO VARIO 2, NEURO VARIO-CLASSIC 2, NEURO VARIO-SPRING 2, NEURO VARIO-SWING, NEURO SWING, NEURO SWING 2, NEURO SWING-CLASSIC

Am Beispiel NEURO VARIO-CLASSIC:

NEURO SPRING, NEURO VARIO, NEURO VARIO-CLASSIC, NEURO VARIO-SPRING

Am Beispiel NEURO SWING Carbon:

NEURO SWING Carbon


Nähere Informationen zu der Nutzungsdauer unserer Systembauteile finden Sie in den [Wartungsplänen](#).




Zum Austauschen des Systemfußbügels benötigen Sie:

- einen neuen Systemfußbügel,
- einen Montage-/Gießdummy passend zum Systemgelenk und
- einen Montage-/Gießdummy für Systemfußbügel.

Hinweis: Achten Sie auf die passende Systembreite.

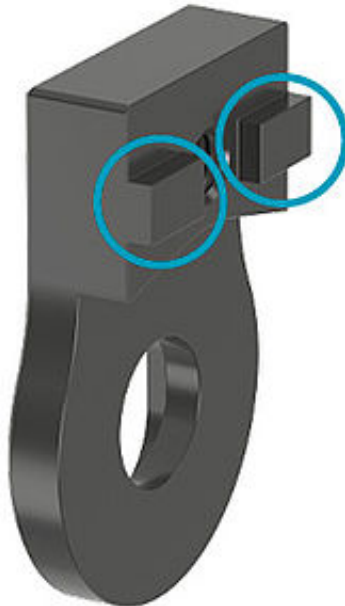

Entfernen Sie die beiden Abstandhalter auf dem Montage-/Gießdummy für Systemfußbügel.

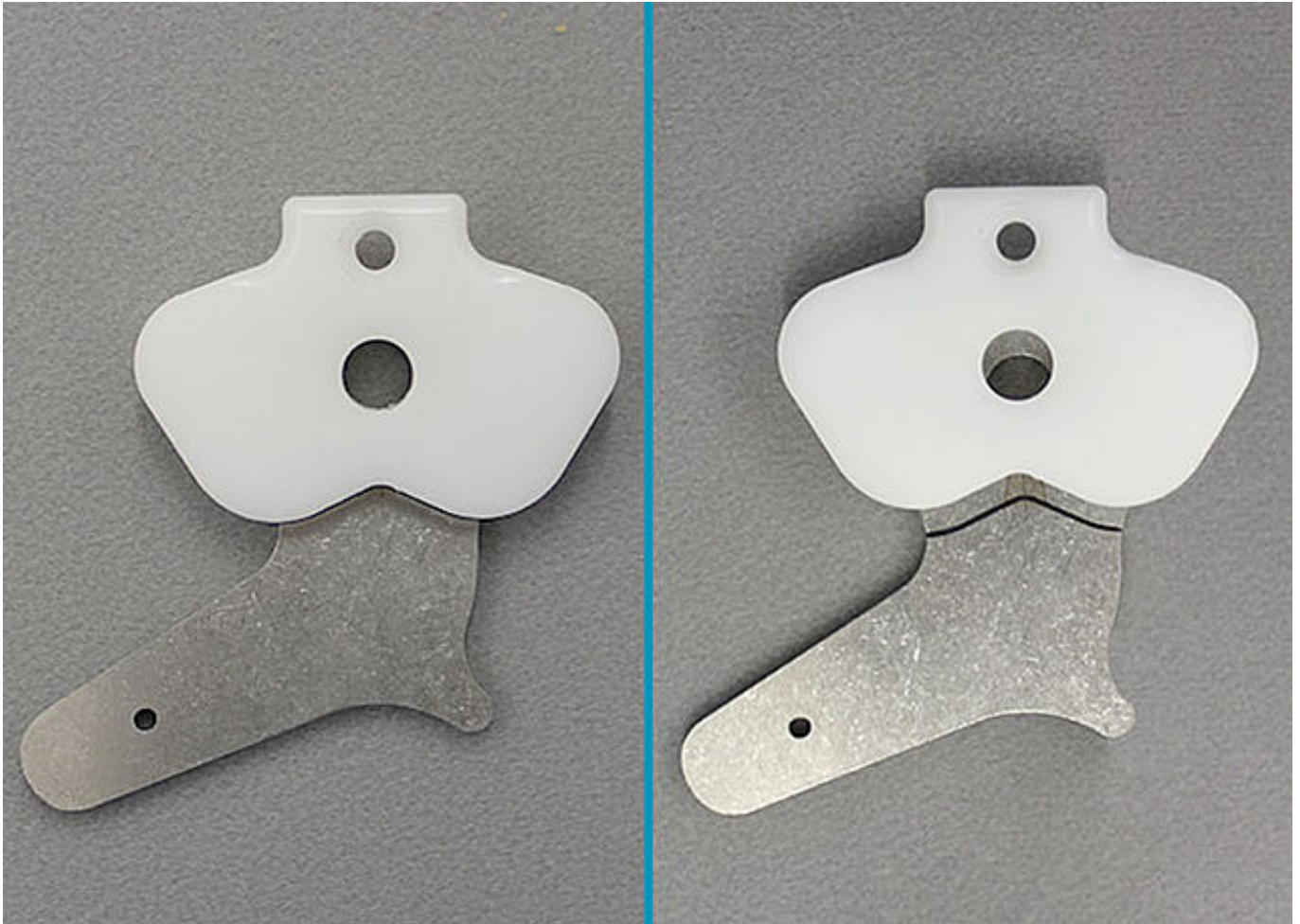

Wichtig! Verwenden Sie einen neuen Systemfußbügel.

Markieren Sie zunächst die untere Kante des Dummys auf dem Systemfußbügel. Alles oberhalb dieser Linie darf nicht verformt werden, da dieser Bereich (die Gelenkfläche) später Teil des Systemgelenkes ist.



Fertigen Sie das Fußteil wie gewohnt. Verwenden Sie dafür den Montage-/Gießdummy für Systemfußbügel statt des Gelenkoberteils.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.de





Montieren Sie das Systemknöchelgelenk wie in der [Gebrauchsanweisung](#) und dem Online-Tutorial beschrieben.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.de



FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.de





Zum Austauschen des Systemfußbügels benötigen Sie:

- einen neuen Systemfußbügel,
- einen Montage-/Gießdummy passend zum Systemgelenk und
- einen Montage-/Gießdummy für Systemfußbügel.

Hinweis: Achten Sie auf die passende Systembreite.




Wichtig! Verwenden Sie einen neuen Systemfußbügel.

Markieren Sie zunächst die untere Kante des Dummys auf dem Systemfußbügel. Alles oberhalb dieser Linie darf nicht verformt werden, da dieser Bereich (die Gelenkfläche) später Teil des Systemgelenkes ist.



Fertigen Sie das Fußteil wie gewohnt. Verwenden Sie dafür den Montage-/Gießdummy für den Systemfußbügel statt des Gelenkoberteils.

Schritt 4/4

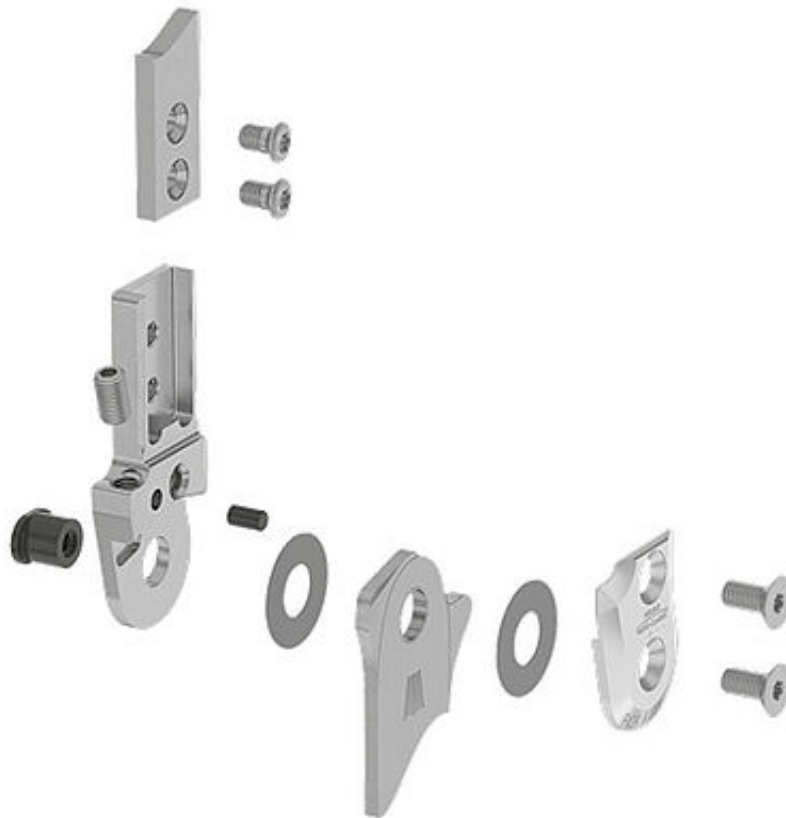

Montieren Sie das Systemknöchelgelenk wie in der [Gebrauchsanweisung](#) und dem Online-Tutorial beschrieben.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.de



FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.de






Zum Austauschen des Systemfußbügels benötigen Sie:

- einen neuen Systemfußbügel und
- einen NEURO SWING Carbon Montage-/Gießdummy.

Hinweis: Achten Sie auf die passende Systembreite.

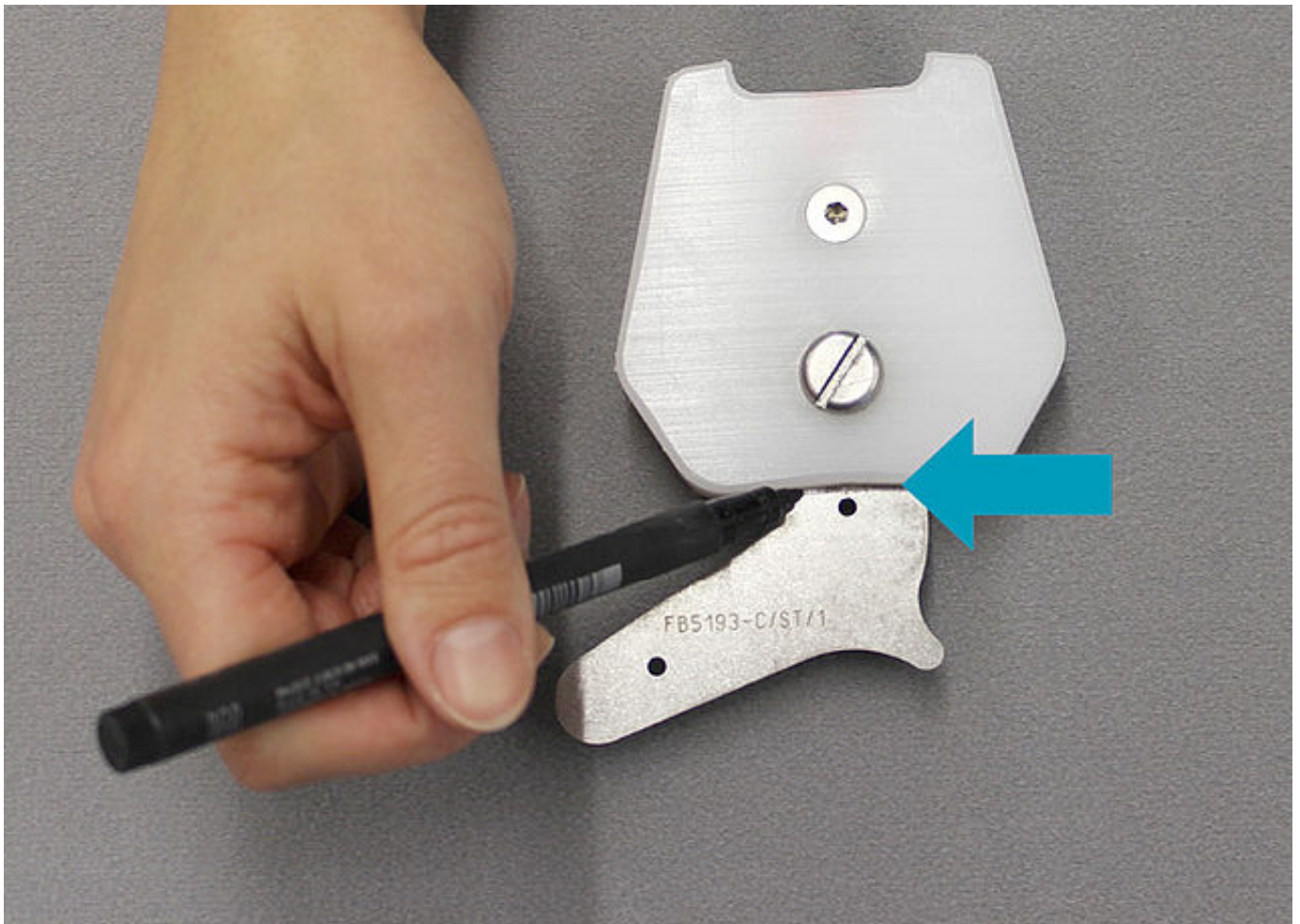

Wichtig! Verwenden Sie einen neuen Systemfußbügel.

Markieren Sie zunächst die untere Kante des Dummys auf dem Systemfußbügel. Alles oberhalb dieser Linie darf nicht verformt werden, da dieser Bereich (die Gelenkfläche) später Teil des Systemgelenkes ist.



Fertigen Sie das Fußteil wie gewohnt. Arbeiten Sie ohne Systemanker.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.de



Schritt 4/4



Montieren Sie das Systemknöchelgelenk wie in der [Gebrauchsanweisung](#) und dem Online-Tutorial beschrieben.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.de



FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.de

