

NEURO SPRING auf NEURO CLASSIC-SWING

In diesem Online-Tutorial wird die Umrüstung von einem NEURO SPRING auf ein NEURO CLASSIC-SWING Systemknöchelgelenk beschrieben. Das NEURO SPRING ist ein Systemknöchelgelenk mit Fußheberfunktion. Sie haben die Möglichkeit, es auf ein NEURO CLASSIC-SWING Systemknöchelgelenk umzurüsten, um so ein Gelenk mit verstärkter Fußheberfunktion und dynamischem Plantaranschlag zu erhalten.

Weitere Informationen zu den Systemknöchelgelenken finden Sie in der [Gebrauchsanweisung](#) vom NEURO SPRING und in der [Gebrauchsanweisung](#) vom NEURO CLASSIC-SWING.

Zudem finden Sie hier das Online-Tutorial zur Gelenkmontage vom NEURO SWING Systemknöchelgelenk.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg

+49 4131 24445-0
+49 4131 24445-57

info@fior-gentz.de
www.fior-gentz.de



FIOR & GENTZ


Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg

+49 4131 24445-0
+49 4131 24445-57

info@fior-gentz.de
www.fior-gentz.de



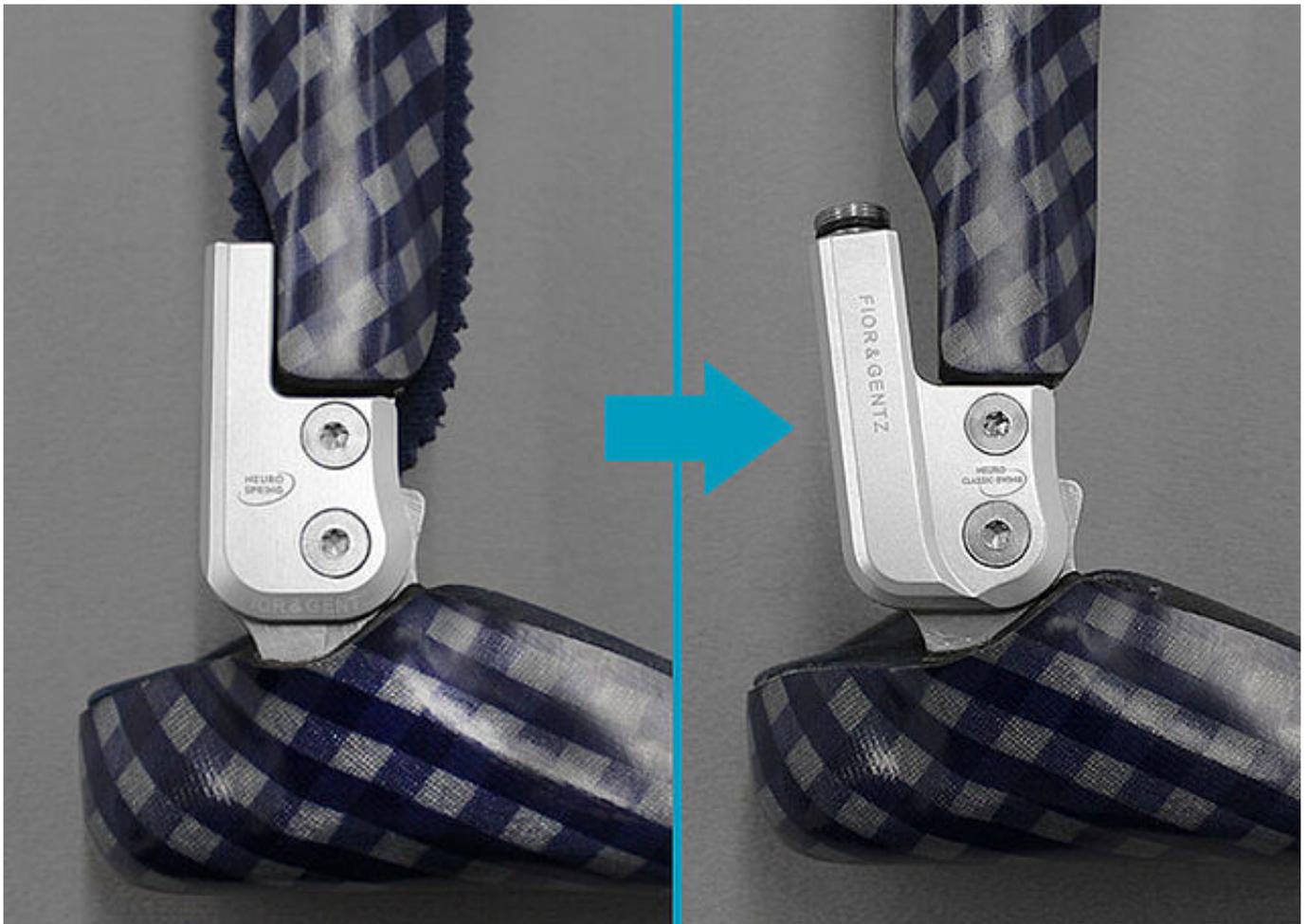

Das NEURO SPRING ist ein Systemknöchelgelenk mit Fußheberfunktion, das Sie in wenigen Schritten auf ein NEURO CLASSIC-SWING mit **verstärkter Fußheberfunktion** und **dynamischem Plantaranschlag** umrüsten können.

FIOR & GENTZ


Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.de



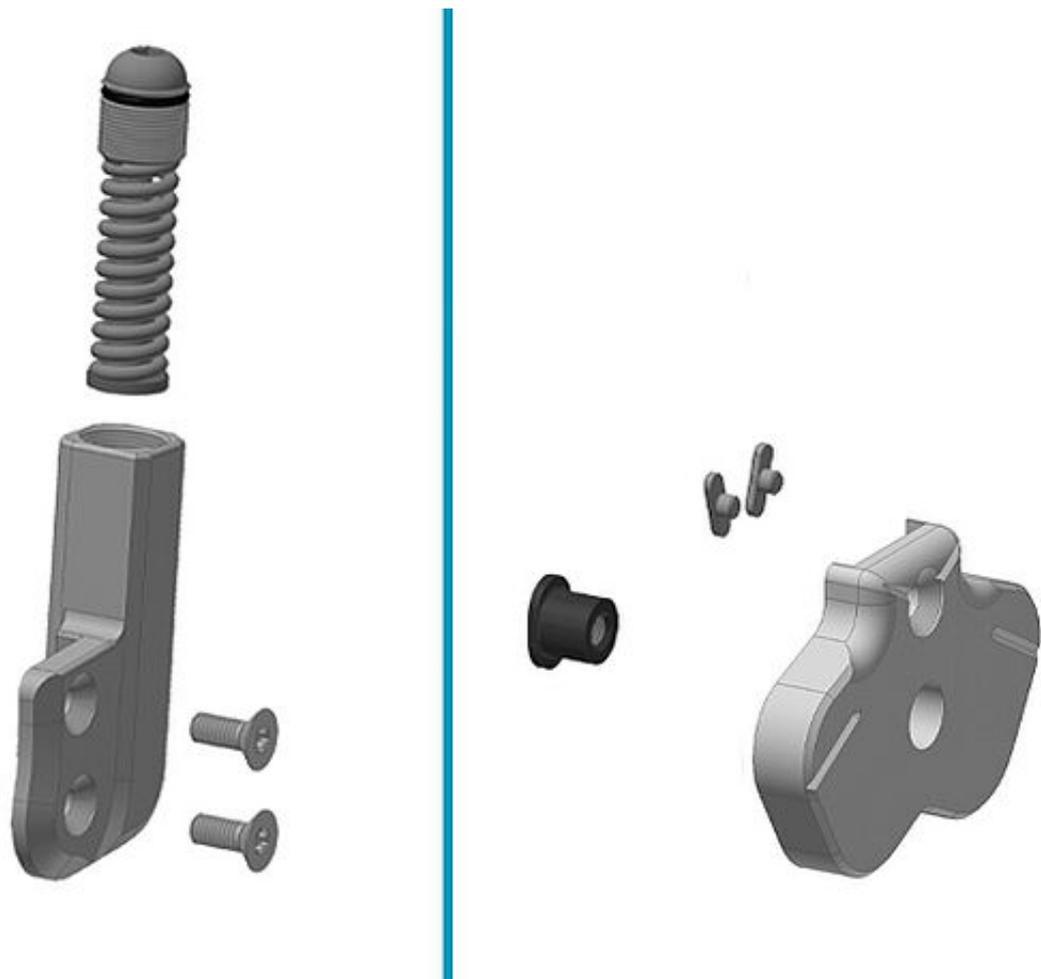

Dafür benötigen Sie die **Funktionseinheit** des NEURO CLASSIC-SWING Systemknöchelgelenkes, bestehend aus:


- der Deckplatte
- der Schraubeinheit und
- den Senkschrauben.

Und das Set für den **Umbau auf plug + go Modularität**, bestehend aus:

- dem Splintbolzen
- zwei Passfedern mit Stift und
- dem äußeren Montage-/Gießdummy.

Hinweis: Achten Sie auf die passende Systembreite!

Schritt 3/4

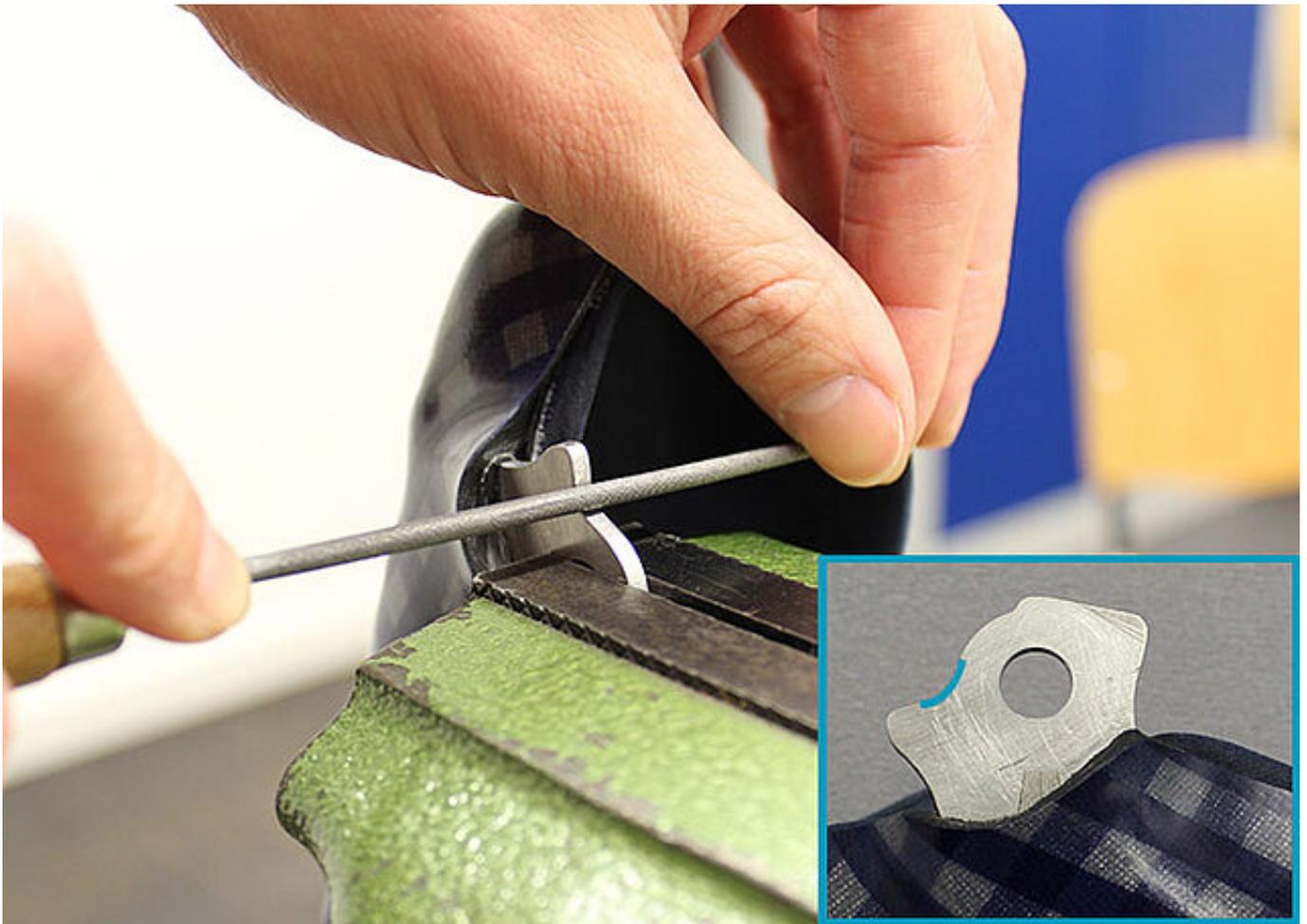

Beschleifen Sie den Systemfußbügel mit einer runden Feile bis zur Laserlinie.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH


Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg

+49 4131 24445-0
+49 4131 24445-57

info@fior-gentz.de
www.fior-gentz.de

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM

Schritt 4/4

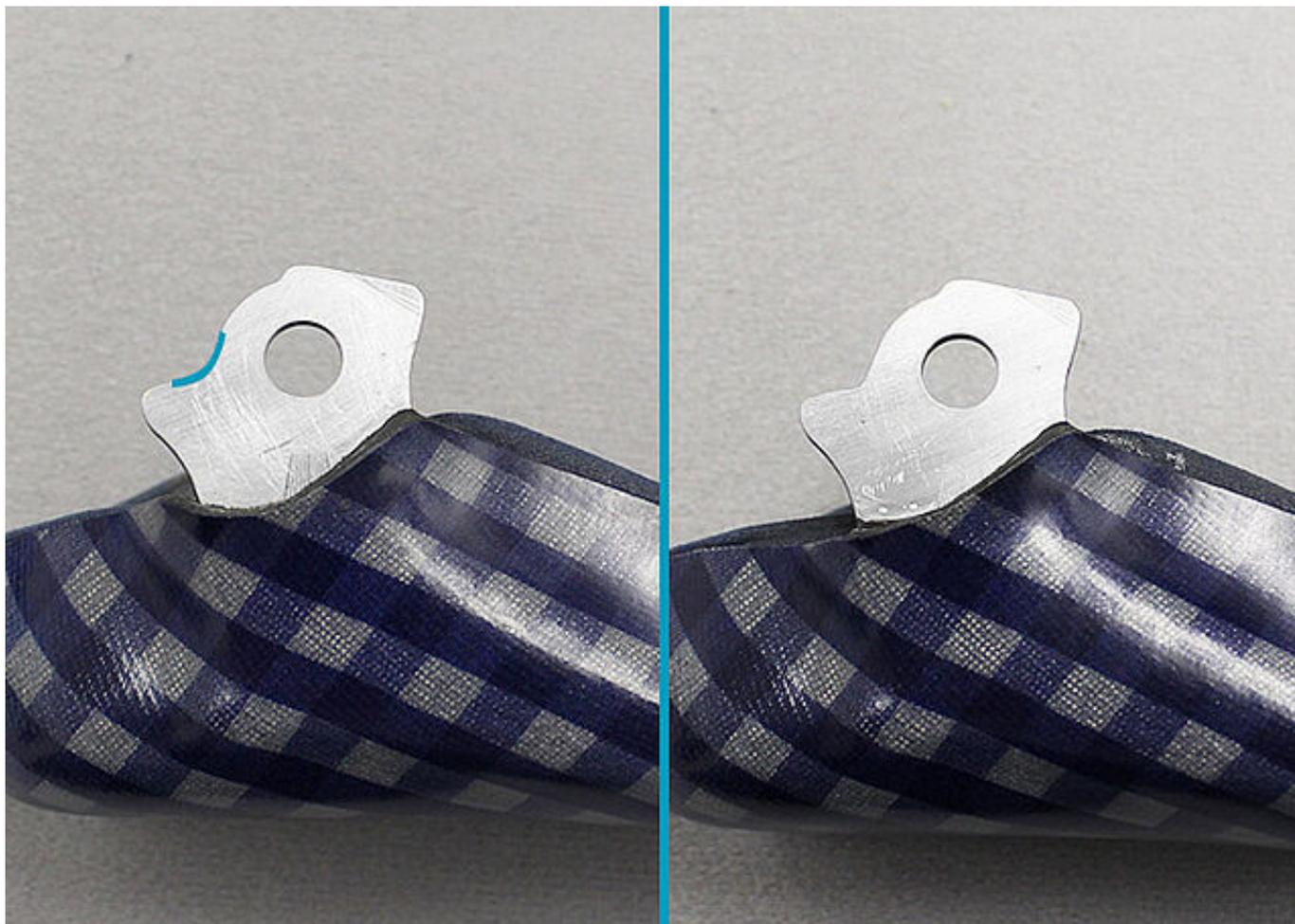

Nachdem Sie den mit der Linie versehenen Teil weggeschliffen haben, sieht der Systemfußbügel wie auf der rechten Seite aus.

Hinweis: Achten Sie darauf, beim Beschleifen keine Sollbruchstellen zu produzieren.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg

+49 4131 24445-0
+49 4131 24445-57

info@fior-gentz.de
www.fior-gentz.de

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg

+49 4131 24445-0
+49 4131 24445-57

info@fior-gentz.de
www.fior-gentz.de



Schritt 1/4



Montieren Sie das Systemgelenk wie in der [Gelenkmontage Systemknöchelgelenke mit plug + go Modularität](#) beschrieben. Um die Passfedern mit Stift einzupressen, beachten Sie bitte das dazugehörige [Online-Tutorial](#). Die Federeinheit wird in diesem Schritt noch nicht montiert.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg

+49 4131 24445-0
+49 4131 24445-57

info@fior-gentz.de
www.fior-gentz.de

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM



Bringen Sie das Systemgelenk in Plantarflexion und überprüfen Sie den Sitz der Deckplatte am Laminat. Nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen am Laminat vor.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädiotechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg

+49 4131 24445-0
+49 4131 24445-57

info@fior-gentz.de
www.fior-gentz.de



Schritt 3/4



Überprüfen Sie den Sitz der Deckplatte auch von hinten und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen am Laminat vor.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg

+49 4131 24445-0
+49 4131 24445-57

info@fior-gentz.de
www.fior-gentz.de

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM



Setzen Sie die Federeinheit wie in der [Gelenkmontage Systemknöchelgelenke mit plug + go Modularität](#) beschrieben ein und drehen Sie sie maximal bis zum Systemfußbügel ein.

Wurde der Dorsalanschlag entfernt, drehen Sie die Federeinheit so weit ein, bis der Winkel vom Unterschenkel zum Boden im Schuh korrekt ist, während man die Orthese gegen die Federkraft hält.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg

☎ +49 4131 24445-0
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de
🌐 www.fior-gentz.de

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM

Letzte Aktualisierung: 11.12.2018

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg

+49 4131 24445-0
+49 4131 24445-57

info@fior-gentz.de
www.fior-gentz.de

