


Passfedern austauschen

Einige unserer Systemknöchelgelenke haben sogenannte Passfedern mit Stift, die im Gelenkoberteil sitzen. Im Folgenden beschreiben wir Ihnen, wie Sie vorgehen sollten, wenn Sie die Passfedern mit Stift aufgrund einer Wartung austauschen müssen.

Nähere Informationen zu der Nutzungsdauer unserer Systembauteile finden Sie in den [Wartungsplänen](#).

Schritt 1/7

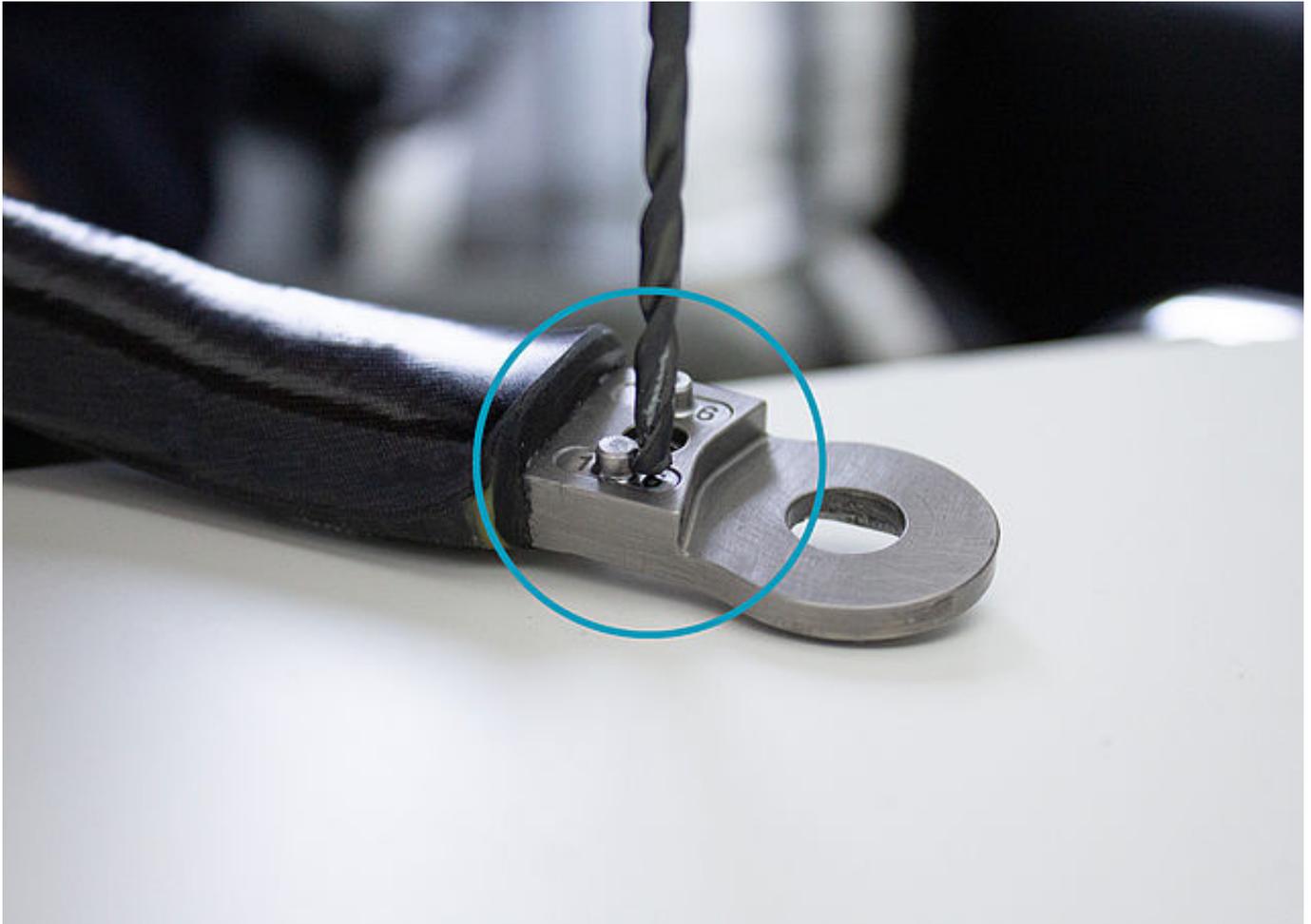

Entfernen Sie defekte Passfedern mit Stift, indem Sie sie vorsichtig mit einem kleinen Bohrer ausbohren.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg

+49 4131 24445-0
+49 4131 24445-57

info@fior-gentz.de
www.fior-gentz.de

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM



Reinigen Sie die Nuten am Gelenkoberteil gründlich, da sonst die Passfedern mit Stift nicht richtig montiert werden können. Dies ist wichtig, da sich falsch montierte Passfedern mit Stift nur sehr schwer wieder entfernen lassen.

Schritt 3/7



Stecken Sie die beiden Passfedern mit Stift in die Senkungen vom Montage-/Gießdummy.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH


Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg

+49 4131 24445-0
+49 4131 24445-57

info@fior-gentz.de
www.fior-gentz.de



Schritt 4/7

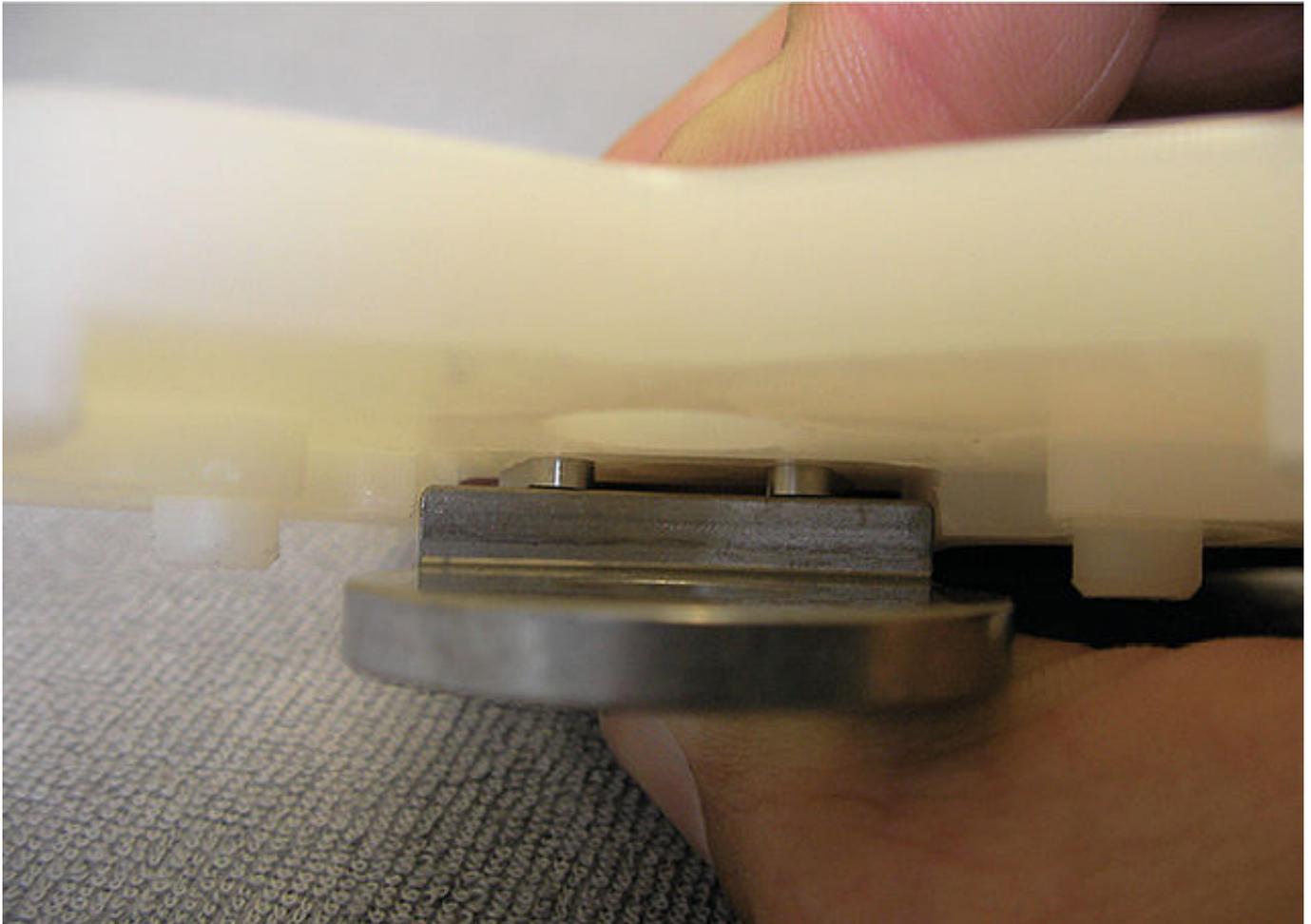

Setzen Sie den Montage-/Gießdummy so auf das Gelenkoberteil, dass die Passfedern mit Stift in den Nuten sitzen.

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH


Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg

+49 4131 24445-0
+49 4131 24445-57


info@fior-gentz.de
www.fior-gentz.de

FIOR & GENTZ
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM

Schritt 5/7

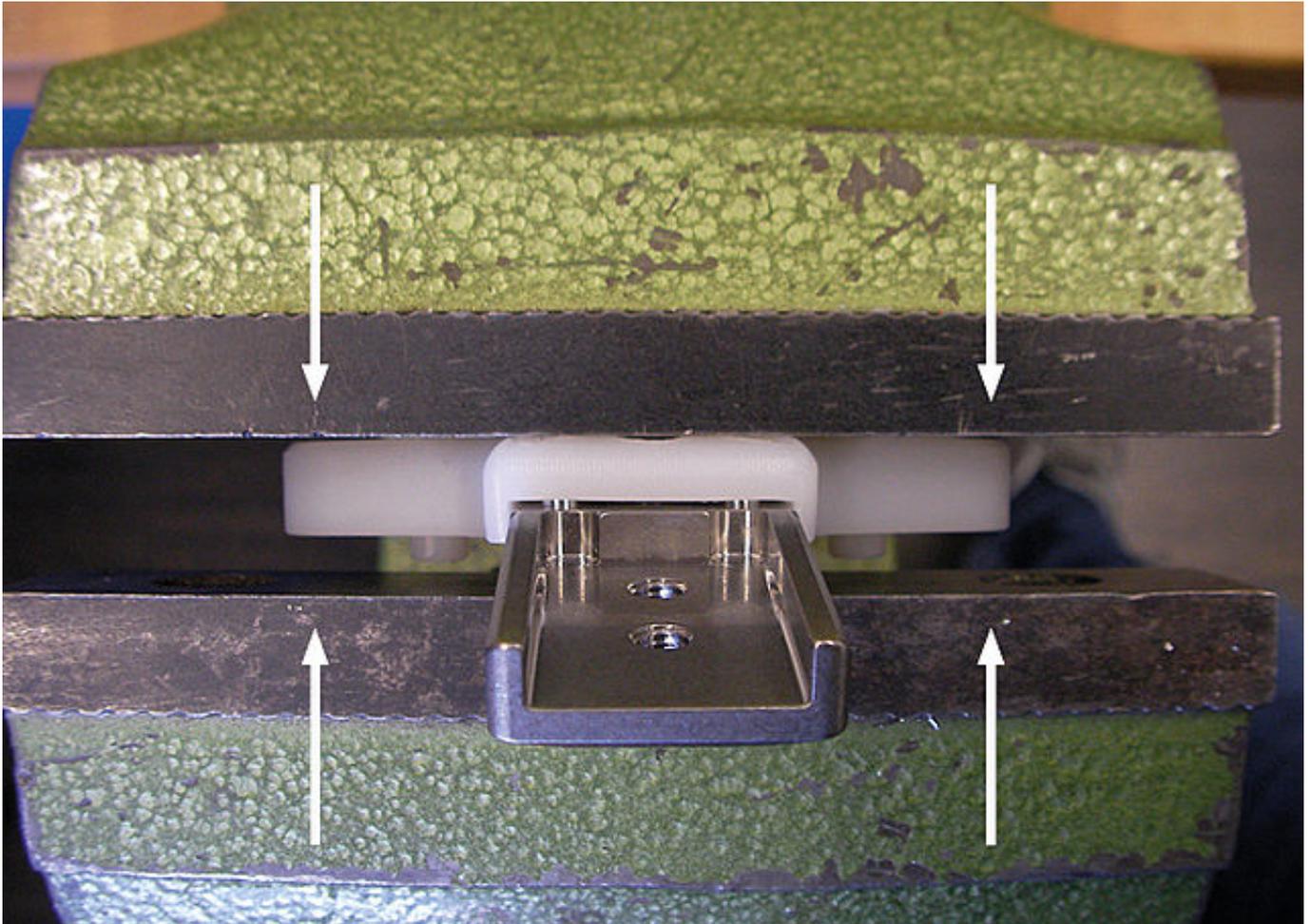

Verpressen Sie den Montage-/Gießdummy und das Gelenkoberteil in einem Schraubstock mit glatten Backen, bis zwischen beiden kein Spalt mehr zu sehen ist.

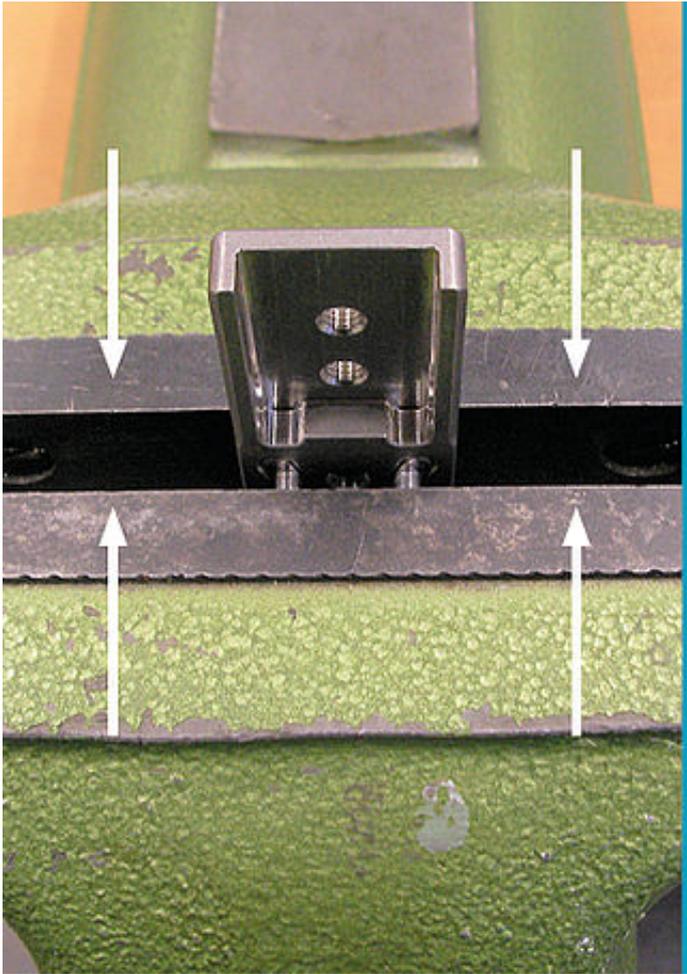

Entfernen Sie den Montage-/ Gießdummy. Verpressen Sie das Gelenkoberteil und die Passfedern mit Stift behutsam in einem Schraubstock mit glatten Backen, bis die Passfedern mit Stift bündig mit dem Gelenkoberteil abschließen.



Montieren Sie die Deckplatte an das Gelenkoberteil, ohne die beiden zu verkleben. Verpressen Sie das Gelenkoberteil und die Deckplatte wie in der [Gebrauchsanweisung](#) beschrieben. Fahren Sie wie gewohnt mit der Gelenkmontage fort.

Letzte Aktualisierung: 04.10.2022

FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5
21337 Lüneburg

+49 4131 24445-0
+49 4131 24445-57

info@fior-gentz.de
www.fior-gentz.de

